



! ベースメーカーを使用
されている方へご注意
**必ず心臓から15cm以上
離してご使用ください**

【各部名称】

① ON-OFFスイッチ



② 受話ボタン

③ P プログラム切り替えボタン

④ 補聴器マイク 消音ボタン
(プロミスのみ使用可)

⑤ 充電用ミニUSB端子

⑥ 受話ボリュームボタン




⑦ 送話用マイク

⑧ 取付用クリップ

⑨ LEDランプ

⑩ 補聴器 ペアリング用ボタン

⑪ 携帯電話 ペアリング用ボタン(Bluetooth)

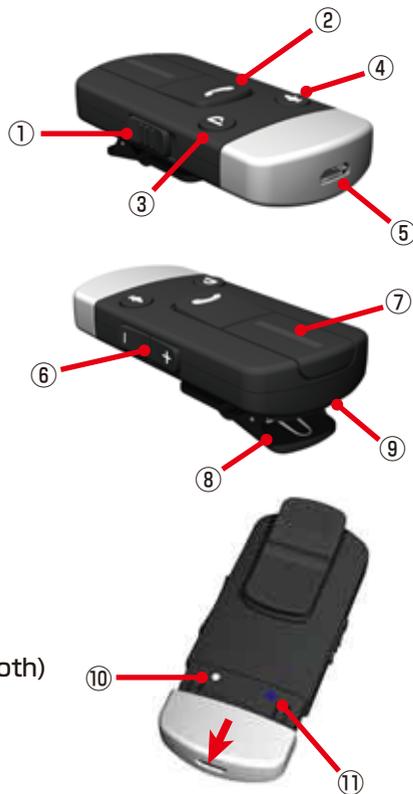

【充電について】

満充電 : 3時間
連続使用 : 約6時間

フォンリンク2をご使用される前に、初回フル充電をしていただく必要があります。3時間以上の充電を行ってください。安全のため、必ず付属のUSBケーブルと電源アダプタを使って充電してください。充電中、LEDが赤色点灯しています。充電が完了したら、LEDが赤と緑の交互に点灯します。



【動作早見表】

電源を入れる	①スイッチを下げる。 LEDは緑点滅。	電源を切る	①スイッチを上げる。 LEDは消灯。
充電時間	ランプが赤・緑の 交互点灯になるまで 初回は 3時間以上 。	連続通話時間	6時間
携帯電話と ペアリング	⑪ ● ボタンを押す。 LEDは青点灯。	補聴器と ペアリング	⑩ ○ ボタンを押す。 LEDはオレンジ点滅。
着信時 (電話を取る)	呼出音が聞こえたら ②受話ボタン を 一回押す。	着信時 (着信拒否)	呼出音が聞こえたら ②受話ボタン を 二回押す。
通話時 (通話終了)	②受話ボタン を 一回押す。	リダイヤル	②受話ボタン を 二回押す。
通話音量の 調整	⑥ボリュームで調整。 またはリモコンで 補聴器音量変更		
LEDランプが 青点灯	携帯電話との ペアリング待機中	LEDランプが 1.5秒おきに オレンジ点滅	補聴器との ペアリング待機中 または充電低下警告
LEDランプが 赤点灯	フォンリンク2 充電中	LEDランプが 赤・緑交互点灯	フォンリンク2 充電完了
LEDランプが 2秒おきに 緑点滅	待機状態	LEDランプが 2秒おきに 青点滅	着信中 / 通話中




! ベースメーカーを使用
されている方へご注意
**必ず心臓から15cm以上
離してご使用ください**

【ペアリング】

「ペアリング」とは補聴器・フォンリンク2・携帯電話をそれぞれ接続し使用できるようにする作業のことを言います。

※ペアリング作業はあらかじめ販売店で設定済みですが、もし動作しなくなった時には下記の手順で再度ペアリングを行ってください。

ペアリングを行う前に、一旦フォンリンク2と補聴器の電源を切ります。
補聴器のバッテリーロッカーを開けます。
※充電式補聴器は充電器へ入れるか、メモリーボタンを5秒間長押しします。

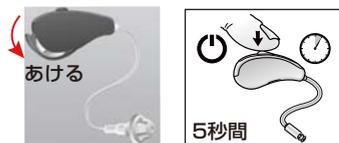

① フォンリンク2の電源を入れます。

② 補聴器とのペアリングを行います。

フォンリンク2のシルバーカバーを外し、裏面の白いボタン（補聴器ペアリングボタン）をペン先などで軽く押します。LEDがオレンジの点滅を始めますので、20秒以内に補聴器のバッテリーロッカーを閉めて電源を入れます。
※充電式補聴器は充電器から取り出すか、メモリーボタンを5秒間長押しします。



③ つづいて携帯電話とのペアリングを行います。

白いボタンの横にある青いボタン（Bluetooth設定ボタン）をペン先などで軽く押します。LEDが青く点灯してペアリング待機状態になります。携帯電話との設定は、それぞれの携帯電話の取扱説明書をご覧ください。ここでは一般的な接続方法をご紹介します。



I 携帯電話の「設定」→「Bluetooth」→「デバイス」の「Hearing Aid Phone」を選びます。



II パスキー入力画面が出ましたら、「0000」を打ち込みます。



III 「接続されました」と表示されれば完了です。この時、「接続デバイス」を聞いてきたら「ヘッドセット」をお選びください。

携帯電話との接続が成功した時は、LEDランプが一瞬消灯し、青色点滅に戻ります。

以上で、ペアリング作業は終了です。

【使用方法】

🎵 電話の着信があると、フォンリンク2を介して補聴器より呼出音が聞こえます。

🎵 電話に出るときは、正面の通話ボタン を押します。相手の声が聞こえ始めます。

🎵 受話音量の変更は、横にありますボリュームで簡単に変更できます。

🎵 フォンリンク2についている装着用クリップは、回転します。声をしっかりとらえられるように、本体のマイクが真上を向くように（図の形状）衣服に装着してください。

🎵 フォンリンク2を装着して、話をするための有効距離は、15～30cmです。

🎵 フォンリンク2と携帯電話の距離は、最大で見通し距離10mとなります。それを超えると接続が切れますのでご注意ください。

※ 電話をかける場合、携帯電話の機種によっては通話モードへ自動的に切り替わらない場合があります。もし発信音が聞こえてこない場合は正面の通話ボタンを押し、手で切り替えをお願いいたします。

