




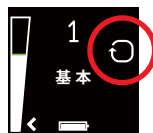
! ペースメーカーを使用
されている方へご注意
**必ず心臓から15cm以上
離してご使用ください**

【操作方法】

リモコン2を使用するときは、補聴器から近い距離（1m以内）で使用してください。




リモコンと通信できていない場合は、画面に  アイコンが表示されます。



【各部の名称】

- ① ON-OFFスイッチ（下げるとON）
- ② 画面
- ③ リンクボタン
補聴器とTVリンク・ボイスリンク(別売)を接続する際に押します。
- ④ ホームボタン
設定されている初期状態に戻します。
- ⑤ 消音モードボタン(トウラーは使用不可)
補聴器のマイクからの音声を消すことができます。
- ⑥ 音量調節ボタン(+ / -)
- ⑦ 耳選択ボタン
<(左耳)・>(右耳)を1~2回押すと調節できる耳が左 ⇄ 両耳 ⇄ 右と切り替わります。
- ⑧ プログラムボタン
押すことによって、補聴器の設定プログラムが順番に切り替わります。
- ⑨ ペ어링ボタン
ペアリング：補聴器とリモコン2を同期し、使用できるようにします。

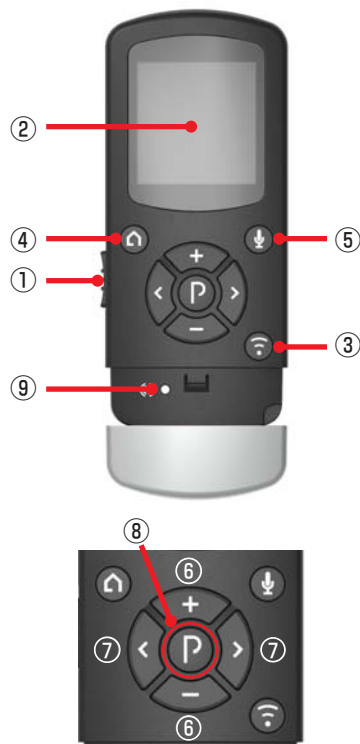

【画面表示】

<音量調節>

現在の補聴器からの音量が表示されます。また、< > ボタンを操作することで 左⇄両耳⇄右の切り替えができ、両耳 / 片耳の調節が可能です。



<ダイレクトラインの使用>

フォンリンク2使用時

ボイスリンク・TVリンク2使用時





<バッテリー残量警告>

規定値よりも電圧が下がった場合に表示されます。補聴器は電池交換、リモコン2は充電が必要となります。

補聴器の電池容量の場合

リモコン2本体の充電警告の場合

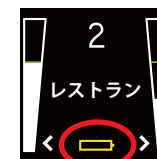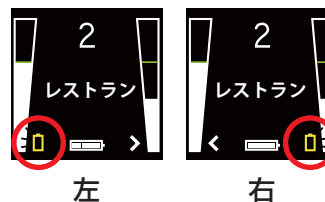




! ペースメーカーを使用
されている方へご注意
**必ず心臓から15cm以上
離してご使用ください**

【充電について】

満充電 : 2.5時間
連続使用 : 1日20回使用で約28日間

初回使用につきましては、必ずフル充電になるようお願いいたします。付属のUSBケーブルと電源アダプターを使用し、充電します。充電が始まると画面下部の電池マークの中のバーが1→2→3と点滅し、3本とも点灯すると充電完了です。

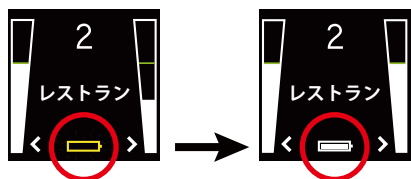

* 安全のため、専用のケーブルとアダプターをご使用ください


【ペアリング】

リモコンで補聴器を操作するには「ペアリング」が必要です。


- ① リモコンの電源をいれ銀色のカバーを外し、中の白いボタンをペン先など先の細いもので軽く押します。この時補聴器の電源は、切っておいてください。



- ② 画面のようなペアリングモードになったら補聴器の電源を入れます。

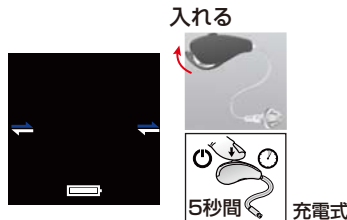

- ③ ペアリングが完了すると音量調節バーが現れます。うまく通信できていない場合は、 アイコンが表示されます。

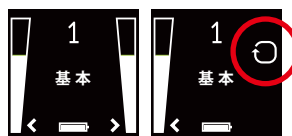

【ワイヤレス切り替え】

- ・通常モードのときに右下のリンクボタンを押すと、ペアリングをしたTVリンク / ボイスリンクと接続できます。通常モードに戻したい場合は、Pボタンか左上のホームボタンを押すことで解除されます。



【スタンバイモード】

20秒間操作がない場合、スタンバイモードになり、画面が暗くなります。何かボタンを押しますと再び画面表示されますので、それから操作を再開するようにしてください。


【Q&A】

Q：補聴器にTVリンク、ボイスリンクは何台まで接続できますか？

A：両方合わせて3台までです。リンクボタンを押すごとに、A / B / Cと切り替わります。



探しているとき

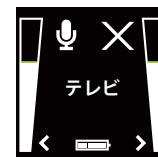

見つからないとき



接続中

Q：+ / - ボタンを操作しても、音量が変わらない

A：補聴器のボリューム設定が ±0 または「オフ」になっていませんか？ご購入店様にてボリューム操作ができるように、フィッティングソフトでボリュームの範囲設定の変更または「オン」にしてみてください。

Q：リモコン2のボリューム初期位置の変更はできますか？

A：可能です。ご購入店様にてフィッティングソフトを使い、ボリュームの範囲設定の変更が必要です。



Q：リモコン2で以前のTVリンクは使用できますか

A：ペアリングして使用することは可能です。（※ご使用の補聴器が対応していない場合があります。ご購入店様へご確認ください。）