



リチウムイオン補聴器充電キット Beltone Achieve オーダーメイド

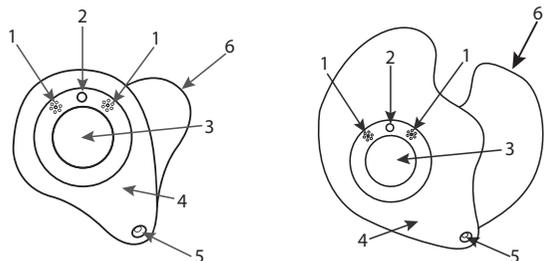



カナルタイプ

カスタムタイプ

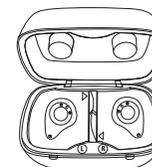

1. マイク (音の入り口)
2. 補聴器動作確認LEDライト
3. メモリーボタン
4. フェースプレート
5. ベント (空気孔)
6. ワックスフィルター (耳垢防止装置)

補聴器 各部名称

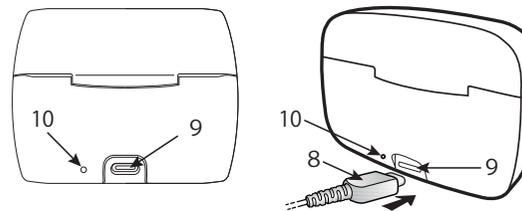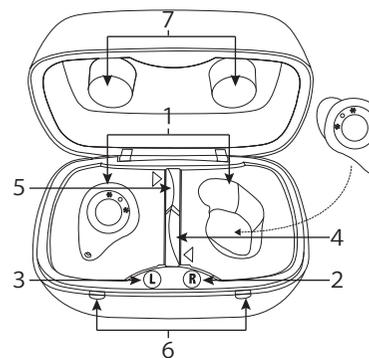

1. 補聴器格納トレイ
2. 左右識別マーカ (赤R=右)
3. 左右識別マーカ (青L=左)
4. 右格納トレイ脱着レバー
5. 左格納トレイ脱着レバー
6. 充電確認インジケータ
7. 充電システム用コイル部
8. 充電用 USB-C ケーブル*
9. 充電用ケーブル差込口
10. 通電確認インジケータ


※ 充電用USB-Cケーブルは動作不良や、故障の原因になる可能性がありますので同梱されているケーブルをお使いください。

充電器 各部名称

充電開始・完了

- ※ オーダーメイド充電器は、充電器本体に蓄電池は入っておりません。USB-C ケーブルをコンセント等に差し込んでご使用いただけます。
- ※ コンセントやパソコンのUSB端子等、電源に差し込まれていても、**上ふたが閉まっていないと補聴器には充電されませんのでご注意ください。**
- ※ 補聴器格納トレイはオーダーメイドになります。
- ※ **補聴器は上ふたを開けた後、充電確認ライトが消えるまで待ってから取り出すようにしてください。音が出なくなることがあります。もしそうなったら再度充電器に戻していただき、充電確認ライトが消えてから取り出します。**


1. 充電器にケーブルを差し込み反対側をコンセント等に差し込んで充電できるようにします。
2. 左右をマーカで確認したのち補聴器を充電器にセットします。セット後、**必ずふたを閉めます。**
3. 充電が始まるとケースの充電確認ライトが点滅を始めます。
4. フル充電されるとケースの充電確認ライトが点灯します。充電完了までは約5時間です。

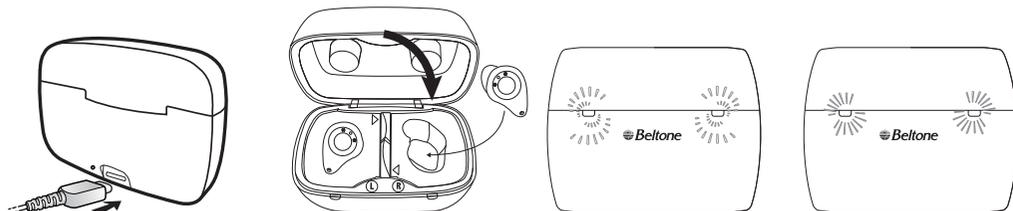

ランプの状況




| 動作 | LEDライトの状態 |
|---------|------------|
| 電源オン | 1回長めの点滅 |
| 電源オフ | 3回点滅 |
| フライトモード | 2回点滅 4度繰返し |

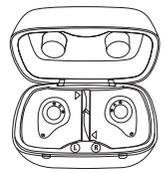

1. 電源のオン・オフ

通常、充電器へ補聴器の出入れをすることでオン・オフができますが、磁界の影響を受けて補聴器が自動的に起動しない場合や補聴器使用中に電源を操作したい場合、メモリーボタンをオン・オフとも**4秒間**長押しします。この時、補聴器のLEDランプがオンの時は**1回長めに点滅**オフの時は**3回点滅**します。

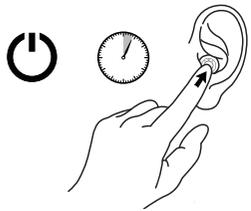

補聴器の操作 1

2. メモリーの切り替え


聴こえや聴取環境に応じて、メモリーを最大4つまで設定でき、メモリーボタンで呼び出せます。電源が入った時には必ず1番目のメモリーが出るように設定されています。ボタンを**短く**押すごとに、2⇒3…と変更でき、その時に「ポーン」という確認音が何回鳴ったかで確認ができます。また**2秒間**押すとワイヤレス機器モードへ切り換わります。

※ 追加・変更等はお店での設定が必要です。




3. フライトモード設定

電波の使用や発信を禁じられるような場所に行く場合「**フライトモード**」にさせていただく必要があります。メモリーボタンにて電源を「オフ」にした後再度**9秒間**長押ししてください。「ポポーン ポポーン」と**10回**聞こえてくるか、LEDランプが「**2度点滅を4回**」繰り返せば設定完了です。

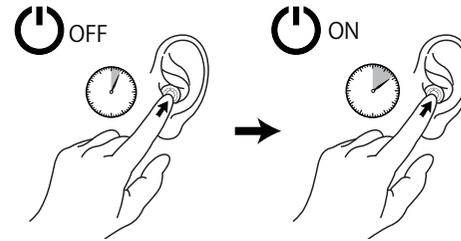

フライトモードを解除したい場合については電源を「オフ」にした後、再度メモリーボタンを押して通常通り「オン」にします。（電源操作の仕方については「1. 電源のオン・オフ」をご参照ください。）

※ フライトモードを使用する場合は、お店での設定が必要です。

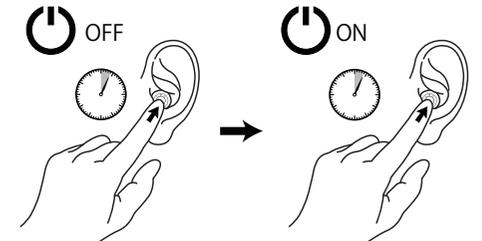


補聴器の操作 2

補聴器の操作 3

4. 音量調整

ボリュームボタンが無い補聴器です。基本的には、リモコンやスマホのアプリでの変更となります。両耳装用の場合はメモリーボタンの長押しで、片側で音量を上げる、もう一方の補聴器で下げるの設定が可能です。

※ 使用するにはお店での設定が必要となります。

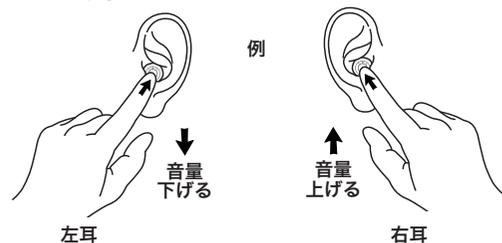


5. 電池残量警告音

補聴器を使用中、ワイヤレス機器を使用中に電池残量のお知らせ（警告）音が出ることがあります。しばらくすると、ワイヤレス機器が使用できなくなったり、補聴器から音が聞こえなくなるため、できるだけ早めに充電を行ってください。

| 充電残量 | お知らせ音 | 補聴器 | リモコンII ミニリモコン | ボイスリンク テレビリンク フォンリンク スマホアプリ |
|------|-------|-----|------------------|--------------------------------------|
| 充電多 | | ○ | ○ | ○ |
| 充電少 | ♪♪♪♪ | ○ | ○ | X |
| 要充電 | ♪♪♪♪ | X | X | X |

※ 聞こえにくくなる原因のひとつに音出孔の汚れや詰まりがあります。定期的な交換が必要です。


ワックスフィルター交換

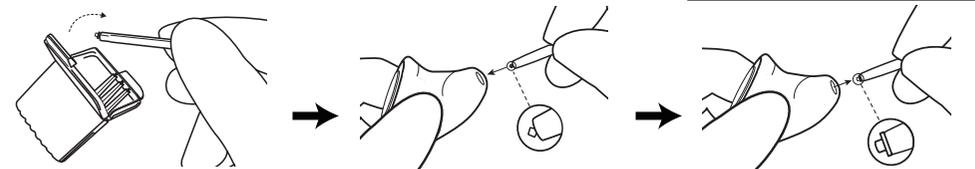

先端にワックスフィルターのついた治具を一本取り出します。

何もついていない方をワックスフィルターにさし込みます。

まっすぐひっぱると、ワックスフィルターが抜けてきます。

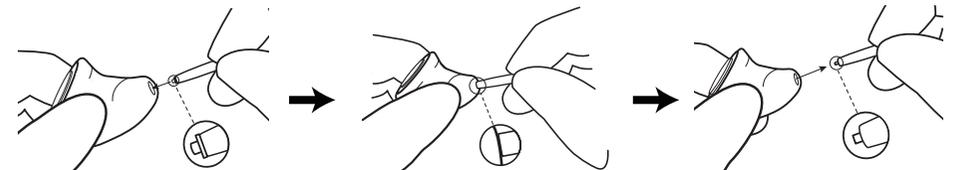

新しいワックスフィルターがついている側を音出孔にあわせませす。

そのまま音出孔にまっすぐさし込みます。

治具をひっぱり、音出孔にワックスフィルターが装着されていれば完了です。