



【使用方法】(1回の充電で平均11時間程度使用可能)

- ① ワイヤレスの音声を聴くときには、補聴器のメモリーボタンを2秒間長押ししてください。補聴器からお知らせ音が流れ、ワイヤレスのモードに変更されます。




- ② メモリープログラムの音声に戻す場合は、補聴器のメモリーボタンを軽く押します。お知らせ音が流れ、通常モードに戻ります。



※ 複数のボイスリンクマイクロ、ボイスリンクプロ、TVリンクを使い分けする場合は、ワイヤレス機器から音声を聞いている状態で、再度ボタンを2秒長押しします。


・会議で使う

会議のテーブルなどに水平に置くことで自動的に無指向性テーブルマイクモードに切り替わり、会議の参加者の声をしっかりとりえられ、聞きもらしが少なくなります。

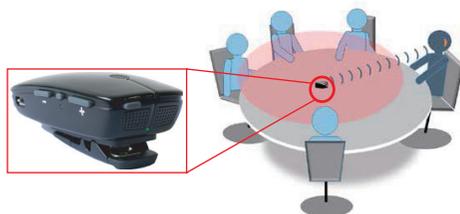


・大切な人の声を聴く

ボイスリンクプロを相手の胸元に装着すると無線マイクとしてご使用になれます。接続有効距離は、見通し距離約10m(条件が良ければ最大25m)まで可能です。(使用環境によっては短くなる場合もあります) マイク位置は、口元から10~40cm以内となるように調節します。また、クリップを動かして本体が垂直になるように装着してください。指向性マイクモードに設定され、環境音の影響を最小限に抑え、話し手の声が聞こえてきます。

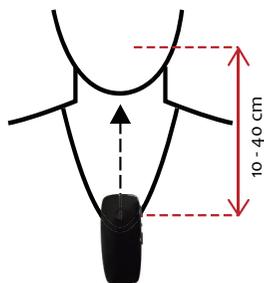

・TVリンクの代わりとして

ボイスリンクをTVリンクの代わりとしてご使用いただけます。オーディオジャックにケーブルを接続し、テレビのヘッドホンジャックなどにつないでいただくと、テレビの音声が直接お楽しみいただけます。

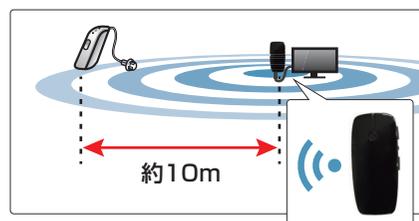

【その他の特徴】

・耳の保護

もしテーブルなどからボイスリンクプロが落ちた場合、大音量の衝撃音が発せられ、耳を傷める原因にもなりかねません。これを防止するために、75cm以上の高さから落下した場合、瞬時に音を一時的にストップさせる機能を搭載しました。

・本体のモード切替機能

4つのモードが用意されています。

- ・ 本体内蔵のマイクモード
- ・ 本体内蔵のTコイルモード
- ・ 携帯音楽プレイヤーなどをケーブルで接続して使用するオーディオモード
- ・ FM受信機(別途必要)をセットして使用できるFM受信機モード



モード切替ボタン

- 本体マイクモード
- 本体Tコイルモード
- オーディオモード
- FM受信機モード

切替は「モード切替ボタン」を押して行います。ボタンを押すと約2秒間、選択されたモードのランプが点灯します。ただし「オーディオモード」と「FMモード」に関してはケーブルや受信機を差し込むと自動的に切り替わります。

・無指向性 / 指向性の自動切替

聴取環境に応じて無指向性 / 指向性を自動的に切替えます。より聴きやすい音を補聴器に届けます。

【こんな時は…】

- ・ ボイスリンクを使用中、補聴器から急に警告音が鳴り普通の補聴器モードになってしまった

電池タイプ / 充電タイプ補聴器とも、ボイスリンクプロと接続不可能なレベルまで電池 / 充電が消耗していることによっておこる現象です。電池タイプは空気電池を新しいものに交換する、充電タイプは充電することで、ボイスリンクからの音声を再度お楽しみいただけます。

- ・ プッシュボタンの長押しがやりにくい

別売のリモコン2を併用していただくことで、簡単に接続していただくことができます。リモコンの右下にあるボタンを押していただくことで、TVリンク / ボイスリンクモードに切り替わります。リモコン2の画面に、使用中機器の名前が表示されます。

(詳しくはリモコン2のかんたんガイドをご覧ください。)

