




**!** ペースメーカーを使用  
されている方へご注意  
**必ず心臓から15cm以上  
離してご使用ください**

## 【各部の名称】

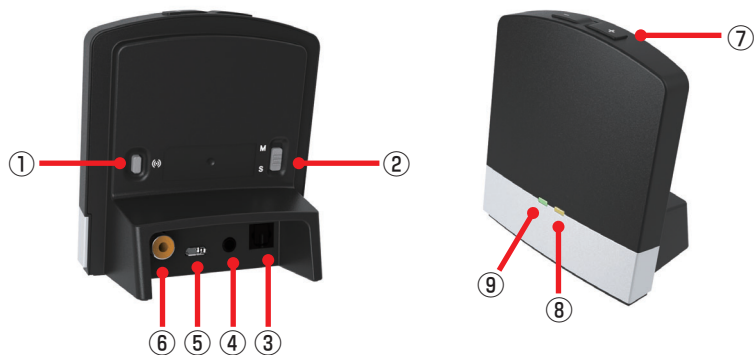

- ① ペアリングボタン
- ② ステレオ / モノラル切り替えスイッチ
- ③ 角型光ケーブル端子 (optical)
- ④ アナログ用ケーブルジャック
- ⑤ 電源用ミニUSB端子
- ⑥ 同軸光ケーブル端子 (coaxial)
- ⑦ ボリューム調整ボタン
- ⑧ オレンジLED点灯：補聴器と通信中
- ⑨ グリーンLED点灯：電源ON

## 【テレビとの接続】

- ① 電源ケーブルのミニUSB端子部分をTVリンク2本体へ接続した後、電源アダプタ側をコンセントに差し込み、電源を入れます。
- ② 背面 ② の M / S 切替スイッチ を使って、モノラル / ステレオの切替ができます。  
※ 下記設定にさせていただくと、より適切な音声をお届けできます。  
(設定されていない場合、音声は聞こえます)  
M(モノラル)： 補聴器を片耳でご使用の場合  
イヤホン端子 (モノラル端子) にTVリンク2を接続する場合  
S(ステレオ)： 補聴器を両耳でご使用の場合
- ③ テレビとTVリンク2をケーブルで接続します。テレビ側にある接続用端子を確認します。

## 【どの端子がありますか？】

「角型 光デジタル端子」があります



この場合は、付属の「光角型ケーブル」を使用して接続してください。  
※先端の半透明のカバーは、必ず外して使用してください。



TVリンクの右端の端子 ③ に差し込みます。

「同軸 光デジタル端子」があります




この場合は、「光同軸ケーブル」を購入して接続してください。



TVリンクの左端の端子 ⑥ に差し込みます。

「ヘッドホン 端子」もしくは「アナログ音声出力端子」があります

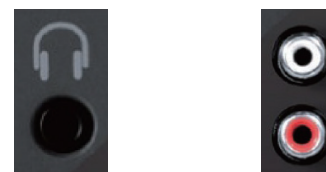

ヘッドホン端子 アナログ音声出力端子  
アナログ端子の場合は、付属の「アナログケーブル」を使用して接続してください。ヘッドホン端子の場合は、変換コネクタをご購入いただいでの使用となります。



TVリンクの右から2つめ ④ に差し込みます。

※変換アダプタを使用してヘッドホン端子に接続される場合、テレビの仕様によってはスピーカーから音が出なくなる場合があります。出なくなった場合、テレビ側の設定によって出せることもあります。お手持ちのテレビのマニュアルをご覧くださいか、お求めになられた家電店へご相談くださいませ。



**!** ペースメーカーを使用  
されている方へご注意  
**必ず心臓から15cm以上  
離してご使用ください**

## 【ご使用の前に】

補聴器と接続するには「ペアリング」作業が必要です。  
下記手順に従ってペアリング作業を行ってください。

- ① テレビとTVリンク2をケーブルで接続し、双方の電源を入れます。（グリーンLED点灯）  
補聴器はバッテリードアを開けて電源を切ります。  
※充電式補聴器は充電器へ入れていただくか、補聴器のプッシュボタンを5秒長押しで切れます。



- ② TVリンク2の背面 ① の「ペアリングボタン」を指で押します。表のオレンジLEDが点滅し始めるとペアリングモードになりますので、20秒以内に補聴器のバッテリードアを閉め、電源を入れます。  
※充電式補聴器は充電器から取り出していただくか補聴器のプッシュボタンを5秒長押しで入ります。


- ③ ペアリングに成功すると、表のオレンジ色LEDが点滅 → 点灯に変わります。

※ 1 台の補聴器に3台までTVリンクの設定が可能です。ペアリングボタンを押す回数で、変更できます。

2 台め ⇒ ボタンを2回押す ⇒ 2回点滅

3 台め ⇒ ボタンを3回押す ⇒ 3回点滅

その後、補聴器の電源を入れて完了です。

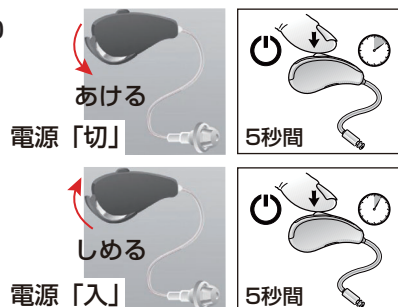

## 【ご使用方法】

### ■ テレビの音声（ワイヤレス）を聞く場合

通常補聴器は3秒、充電式は2秒間補聴器のメモリーボタンを長押しします。  
お知らせ音が流れた後にTVリンクの音声  
補聴器から聞こえてきます。

### ■ 通常モードに戻す場合

補聴器のメモリーボタンを一度カチッと押すとお知らせ音が流れた後に、直前に使用していたメモリーに戻ります。

### ■ TVリンクでの音量調節

本体上部のボタンで音量の調節ができます。  
「+」で音量が上がり「-」で音量が下がります。（1回で2dB可変）




## 【Q&A】

Q: 複数台のTVリンクを使用する場合、切り替えはどうすればいいですか？

A: TVリンクからの音が聞こえている状態で、再度メモリーボタンを3秒（充電式は2秒）長押しすると切り替わります。  
この切り替え時は切り替えのお知らせ音は聞こえてきません。  
またリモコンをご使用であれば、現在使用中の機器名が表示されます。  
（詳しくはリモコン簡単ガイドをご覧ください。）

Q: テレビから離れたところ、通常モードに切り替わってしまいました。

A: 補聴器とTVリンクの作動有効距離は約7mです。これを超えると通信が切断されて通常モードに戻ります。5分以内に有効距離範囲に戻ると自動的にテレビモードに切り替わりますが、それ以上の時間が経過した場合は、再度メモリーボタンを長押ししてワイヤレスモードに切り替えていただく必要があります。

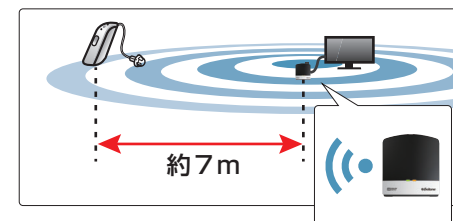

Q: テレビを見ているときに、突然通常モードに切り替わってしまいました。

A: 1-1.ご使用の電池が、消耗してくると起こる現象です。この場合は、電池を新しいものに交換して使用を続けてください。電池交換後は再度メモリーボタンを長押しして、テレビモードに切り替えてください。

1-2.充電式補聴器の充電容量が少なくなっています。

いったん充電器に戻して充電してください。電池交換後は再度メモリーボタンを長押しして、テレビモードに切り替えてください。

2.電池が新しいのに切れてしまう場合、近くにハロゲン球を使ったスタンドやハロゲンヒーターなどありませんか？もしあれば、それが原因で切断される可能性があります。TVリンクと補聴器の間にそれらの機器が設置されないようにしてください。