

【各部名称】

- ① ON-OFFスイッチ
- ② マイク
- ③ マイク
- ④ LEDインジケーター
- ⑤ ボリューム 小
- ⑥ ミュートボタン
- ⑦ ボリューム 大
- ⑧ 充電用マイクロUSB端子
- ⑨ ミュート用LEDインジケーター
- ⑩ ペアリングボタン
- ⑪ 装着用クリップ



★ LED インジケーター表示

電源 / 充電	充電なし	充電中	満充電時
電源オフ			
電源オン (ノーマル)			
電源オン (ボリュームロック状態)			
電源オン (充電が少ない場合)		点滅なし	点滅なし
電源オン (充電が少ない場合) (ボリュームロック状態)		点滅なし	点滅なし
ボリュームロック / アンロック時			
電源が入ったことを示す	3秒	3秒	3秒
電源が切れたことを示す	3秒	3秒	3秒

満充電 : 3時間
連続使用 : 約10時間

【充電について】

- ・ボイスリンクマイクロをご使用される前に、初回はフル充電をしていただく必要があります。3時間以上の充電を行ってください。
- ・安全のため、必ず付属のUSBケーブルと電源アダプタを使用して充電を行ってください。充電中はLEDが赤色点灯しています。
- ・充電が完了したら、LEDが赤と緑の交互に点灯します。



【ペアリング】


「ペアリング」とは … 補聴器とボイスリンクマイクロを同期して使用できるようにする作業です。

※ペアリング作業はあらかじめ販売店様において設定済みですが、もし万が一動作しなくなった時には下記の手順で再度ペアリングを行ってください。

- ① 補聴器の電源を切ります。補聴器のバッテリーロッカーを開けてください。
※充電式補聴器は充電器に入れるか、メモリーボタンを5秒間長押ししてください。



- ② ボイスリンクマイクロの電源を入れ、裏面にある白い「○」ボタンをペン先など先の細いもので軽く押します。LEDインジケーターがグリーン⇒オレンジの点滅になります。点滅確認後、20秒以内に補聴器のバッテリードアを開けて補聴器の電源を入れます。
※充電式補聴器は充電器から取り出すか、メモリーボタンを5秒間長押ししてください。

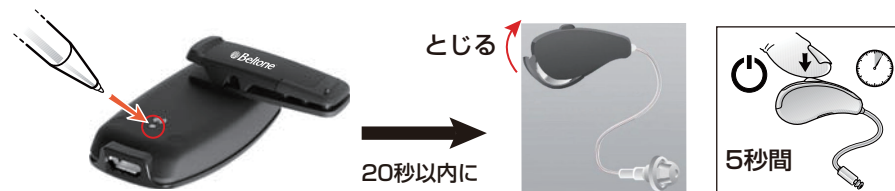

- ③ ペアリングが成功すると、LEDインジケーターがオレンジ点滅⇒点灯状態になりその後、グリーンの点滅に変わります。

ボイスリンクマイクロを買い増しされたり、TVリンクを1番めに設定されている場合は白いボタンを複数回押して追加設定ができます。

※ 1台の補聴器に対し、ボイスリンクマイクロ・TVリンク合わせて3台まで接続可能です。

★ ペアリング時LED インジケーター状況

ペアリングボタンを押す回数	LED点滅状況	チャンネル
1		1
2		2
3		3
ペアリング成功時		

【使用方法】（一回の充電で平均10時間程度使用可能）

- ① ワイヤレスの音声を聴くときには、補聴器のメモリーボタンを長押しします。
（電池式補聴器は3秒間、充電式補聴器は2秒間）
補聴器からお知らせ音が流れ、ワイヤレスのモードに変更されます。




- ② メモリープログラムの音声に戻すときは補聴器のメモリーボタンを一度カチッと押してください。お知らせ音が流れ通常モードに戻ります。



※ ボイスリンク / TVリンクは、ご使用いただく補聴器に対し3台まで設定が可能です。
複数切り替えてご使用の場合は、ワイヤレスモードに切り替えた状態で再度メモリーボタンを長押し（電池式補聴器は3秒、充電式補聴器は2秒）します。

・大切な人の声を聴く

ボイスリンクマイクロを相手の胸元に装着すると無線マイクとしてご使用になれます。
接続有効距離は、見通し距離約10m（条件が良ければ最大25m）まで可能です。
（使用環境によっては短くなる場合もあります）
マイク位置は、口元から10～40cm以内となるように調節します。また、クリップを動かして本体が垂直になるように装着してください。
指向性マイクモードに設定され、環境音の影響を最小限に抑え、話し手の声が聞こえてきます。

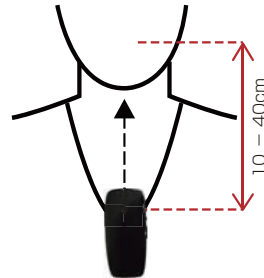

【その他の特徴】

・耳の保護

もしテーブルなどからボイスリンクマイクロが落ちた場合、大音量の衝撃音が発せられ、耳を傷める原因にもなりかねません。これを防止するために、75cm以上の高さから落下した場合、瞬時に音を一時的にストップさせる機能を搭載しました。

・指向性の自動切替わり

聴取環境に応じて無指向性/指向性が自動切替わりします。より聴きやすい音を補聴器に届けます。

【こんな時は…】

・ボイスリンクを使用中、補聴器から急に警告音が鳴り普通の補聴器モードになってしまった

電池タイプ / 充電タイプ補聴器とも、ボイスリンクマイクロと接続不可能なレベルまで電池 / 充電が消耗していることによる現象です。
電池タイプは空気電池を新しいものに交換する、充電タイプは充電することで、ボイスリンクからの音声を再度お楽しみいただけます。

・メモリーボタンの長押しがしにくい

別売のリモコン2を併用していただくことで、簡単に接続していただくことができます。
リモコンの右下にあるボタンを押していただくことで、TVリンク/ボイスリンクモードに切り替わります。
リモコン2の画面に、使用中機器の名前が表示されます。



（詳しくはリモコン2のかんたんガイドをご覧ください。）