

① グレーケーブル + ブーツ(黒色)	電池が必要		+
② グレーケーブル + ブーツ(ベージュ)	電池が必要		+
③ グレーケーブル + 新リボンケーブル	電池が必要		+
④ グレーケーブル + ブーツ(ダークグレー)	電池が必要		+
⑤ 10A用ケーブル	—		

※ケーブルは「ハイプロ」「ノアリンク」「スピードリンク」にて使用可能。


SolusMax	オーダー	器種名	タイプ	接続方法	ノアリンク ワイヤレス対応
		アチーブ イマジン		CIC	③
			カナル/カスタム (充電式)	ノアリンクワイヤレスのみ	
	アメイズ トラスト	リライ	CIC (W) タッチCIC ※トラストのみ カナル タッチカナル カスタム ※アメイズ・トラストのみ	③	○ Wがつくタイプのみ
耳かけ		器種名	タイプ	接続方法	ノアリンク ワイヤレス対応
	シリーン アチーブ イマジン	アメイズ リライ (3・4のみ)	62DW(充電式) / 62SDW(充電式) 63DW(充電式・電池式) / 64DW(電池式)	ノアリンクワイヤレスのみ	
	アメイズ トラスト	リライ	76 / 86DW (充電式)	①	○
			76 / 86 / 64DW	③	
	リライ ブーストマックス/ウルトラ		63DW (電池式) ※トラストのみ	④	
			95DW		

SolusPro	オーダー	器種名	タイプ	接続方法	エアリンク対応
		レジェンド アライ	プロミス トゥルー オリジン	CIC タッチCIC カナル タッチカナル カスタム	③
	プロミス		マイクロインビザ	⑤	×
耳かけ		器種名	タイプ	接続方法	エアリンク対応
	レジェンド アライ ファースト	プロミス トゥルー	76 / 86DW (レジェンド・アライ) 78 / 66DW (ファースト・プロミス・トゥルー) 64DW (レジェンド・アライ・プロミス・トゥルー)	①	
	レジェンド ファースト	プロミス トゥルー	63DW	③	○
	ブースト/ブーストプラス		95DW	④	
	オリジン		85D / 75D / 65D / 85 / 75 / 64D	① ② 64Dのみ	×
	ボールド		95DVI	②	

① グレーケーブル + ブーツ (黒色) 電池が必要



① グレーケーブルとブーツを接続します。
※ケーブルとブーツの赤い印を合わせます。

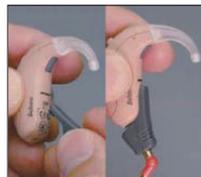

② 補聴器に電池を入れます。ブーツの先端を接片に下から差すように補聴器の底をブーツに合わせ、カチッというまでしっかり接続します。




※補聴器からブーツを外す時は矢印方向にボタンを押します。


② グレーケーブル + ブーツ (ベージュ) 電池が必要



① グレーケーブルとブーツを接続します。
※ケーブルとブーツの赤い印を上に向けます。

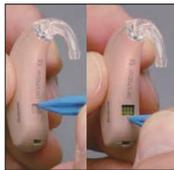


② 接片接続部分の扉を先の細い物で下に開きます。
※必要以上に強く押さえないでください。

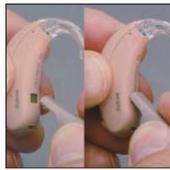

③ 補聴器に電池を入れます。ブーツの先端を接片に対して下から上に差すように合わせます。



④ 補聴器の底をブーツに合わせカチッというまでしっかり接続します。

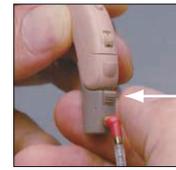

※補聴器からブーツを外す時は矢印方向にボタンを押して外します。

③ グレーケーブル + 新リボンケーブル 電池が必要



① グレーケーブルと新リボンケーブルを接続します。
※赤い印を合わせます。



② リボンケーブルは、バッテリードアの蝶番側の隙間にバッテリードアを開けた状態で接続します。



③ 電池を入れ新リボンケーブルの金色接片が電池とは逆側になるように差し込みます。差し込み後、バッテリードアを閉めます。



レジェンド・ファースト



差込位置



電池を入れます。差込み口に対し、接片は上側です。

プロミス・トゥルー



差込位置



電池を入れます。差込み口に対し、接片は内側です。

④ グレーケーブル + ブーツ (ダークグレー) 電池が必要



① バッテリードアのピンを外しバッテリードアを取り外します。



② ブーツに電池を入れます。



③ ブーツを取り付けます。



④ バッテリードアのピンを差し込みます。



⑤ ケーブルを接続します。

⑤ 10A用ケーブル



① バッテリードア取り外しツールを用意します。



フタを開めるように

② バッテリードアを、取り外しツールを使って+側の薄い部分にひっかけて外します。



合わせる

③ ケーブルの先端をまっすぐに差し込みます。



④ 調整が終了したら、バッテリードアを取り付けます。