



充電オーダー補聴器の充電器用インサートの取り外し・装着

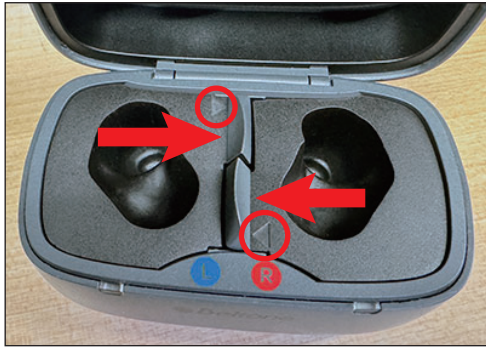


インサートを取り外す場合、充電器の中央にある突起部分を矢印方向へ押します。
右インサートは下側、左インサートは上側の突起になります。
インサートに「▶」マークがあるので参考にしてください。

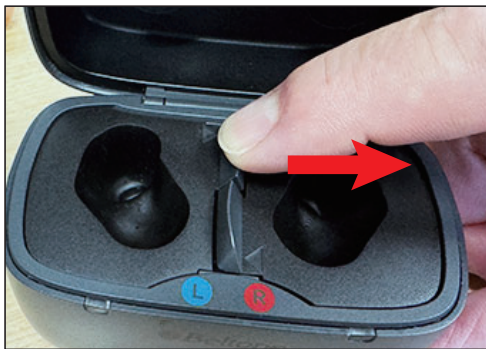

すこし硬めですが、しっかり突起を動かしていただくとインサートが外れます。インサート自体は薄い板状のもので、簡単に取り外せます。



インサートを再度装着していただく時は、インサートの突起と充電器本体のくぼみを合わせて差し込みます。差し込む時に、インサートと充電器の上側が段差のないようにします。

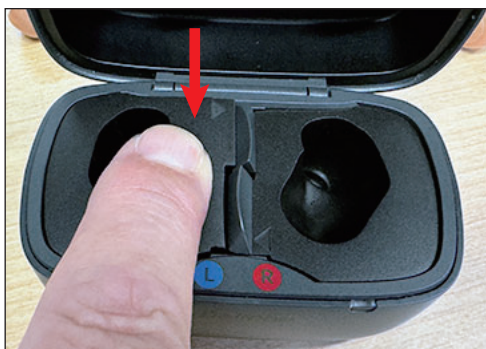

差し込み終わりましたら、インサートの中央寄り部分を上から押さえます。ちょうどインサートの、「▶」部分のでっぱりが中央突起の下に入るように「パチン」と音がするまで押さえてください。



これで完成です。