



リチウムイオン補聴器充電キット Beltone Amaze R 63DW

Rechargeable system
for Hearing Aids
2024.04 Rev.1.1.0

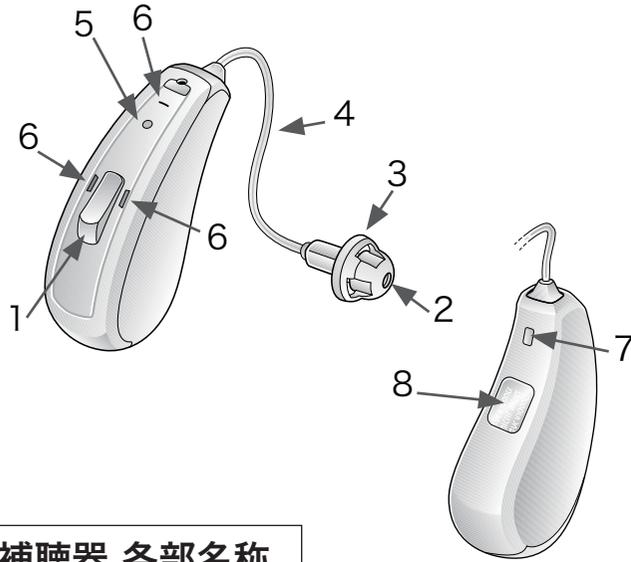

1. メモリーボタン
2. レシーバー (音の出口)
3. 耳せん
4. レシーバーワイヤ
5. 補聴器動作確認用ライト
6. マイク (音の入口)
7. 左右識別マーカー
8. シリアルナンバー

補聴器 各部名称

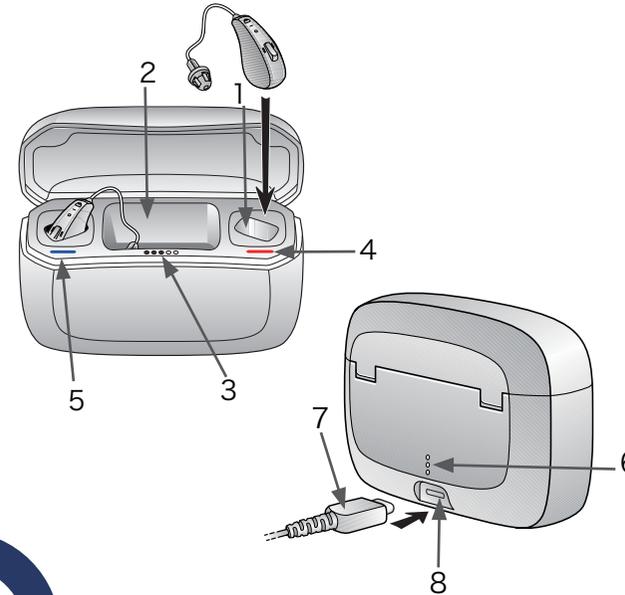

1. 補聴器充電ベイ
2. レシーバー格納ベイ
3. 補聴器充電インジケーター
4. 左右識別マーカー (赤=右)
5. 左右識別マーカー (青=左)
6. 充電器本体体内蔵蓄電池用インジケーター
7. USB-C ケーブル*
8. 充電用ポート


※ USB-C ケーブル について
充電不良や、故障の原因になる可能性がありますので
「必ず同梱されているもの」
をお使いください。

充電器 各部名称

充電開始・完了

※ コンセントに接続していない充電器に 24 時間以上補聴器を入れておくと、充電器から取り出しただけでは自動で電源オンにはなりません。その場合は裏面の「1. 電源のオン・オフ」を参照の上、再度電源を入れなおしてください。

1. 充電器に内蔵してある蓄電池をフル充電します。
2. 充電器に補聴器をセットします。右左は充電器上赤青のマーカーで確認します。
3. 充電が始まると補聴器の動作確認ライトが点滅を始めます。
4. フル充電されると補聴器の動作確認ライトが点灯します。充電完了までは約 3 時間です。

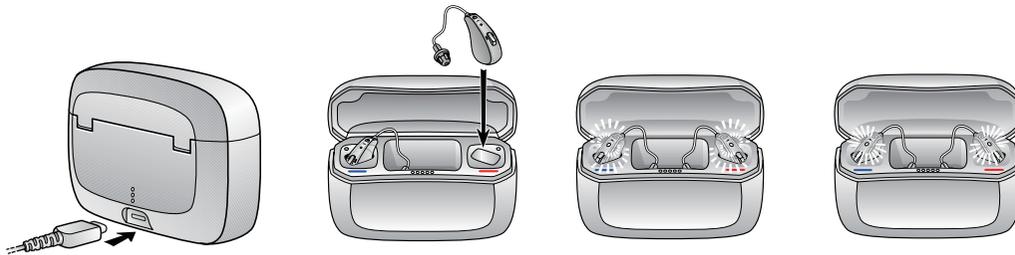

※ 両耳で電池容量が違う場合は少ない方が表示されます。


ランプの状況

1. 充電器内蔵蓄電池
2. 補聴器充電電池
3. 補聴器動作確認ランプ

| LED点灯 | 電池残量 |
|-----------|-------------|
| ● (赤) | 10% 未満 |
| ●● (緑) | 10 - 32% 充電 |
| ●●● (緑) | 33 - 65% 充電 |
| ●●●● (緑) | 66 - 99% 充電 |
| ●●●●● (緑) | 100% 完了 |


| LED点灯 | 充電電池の残量 |
|-------|-----------|
| ● | 0 - 20% |
| ●● | 20 - 40% |
| ●●● | 40 - 60% |
| ●●●● | 60 - 80% |
| ●●●●● | 80 - 100% |

| 動作 | LEDライトの状態 |
|---------|-----------|
| 電源オン | 1回長めの点滅 |
| 電源オフ | 3回点滅 |
| フライトモード | 2回点滅4度繰返し |

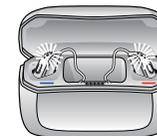

1. 電源のオン・オフ


通常、充電器へ補聴器の出入れをすることでオン・オフができますが、補聴器使用中にも電源を操作したい場合は、メモリーボタンをオン・オフとも5秒間長押しします。この時、補聴器のLEDランプがオンの時は1回長めの点滅、オフの時は3回点滅します。

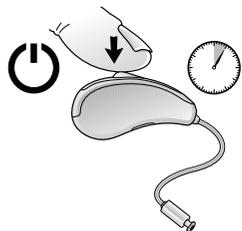

補聴器の操作 1


2. メモリーの切り替え

聴こえや聴取環境に応じて、メモリーを最大4つまで設定でき、メモリーボタンで呼び出せます。電源が入った時には必ず1番目のメモリーが出るように設定されています。ボタンを短く押しごとに、2⇒3…と変更でき、その時に「ポーン」という確認音が何回鳴ったかで確認ができます。また1秒間押すとワイヤレス機器モードへ切り換わります。
※ お店での設定が必要となります。

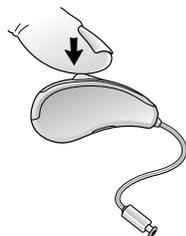


3. フライトモード設定

電波の使用や発信を禁じられるような場所に行く場合、「フライトモード」に設定していただく必要があります。メモリーボタンにて電源をオフにした後、再度ボタンを9秒間長押しします。「ポポーン ポポーン」と10回聞こえてくるか、LEDランプが2度点滅を4回繰り返せば設定完了となります。

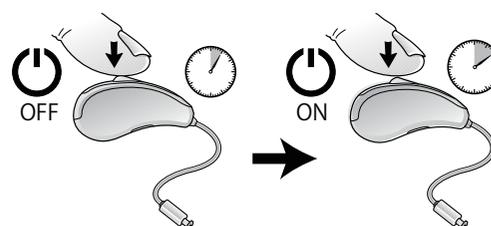

フライトモードを解除したい場合については電源をオフにした後、再度オンにします。(電源操作の仕方については「1. 電源のオン・オフ」をご参照ください。)

※ フライトモードを使用する場合は、お店での内部設定が必要となります。

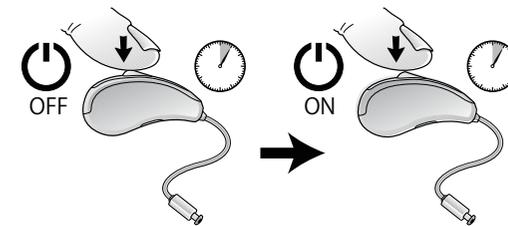


補聴器の操作 2

補聴器の操作 3

4. 音量調整

ボリュームボタンが無い補聴器ですので基本的にはリモコンやスマホのアプリでの変更となります。両耳装用の場合はメモリーボタンの長押しで、片側で音量を上げる、もう一方の補聴器で下げるの設定が可能です。
※ お店での設定が必要となります。

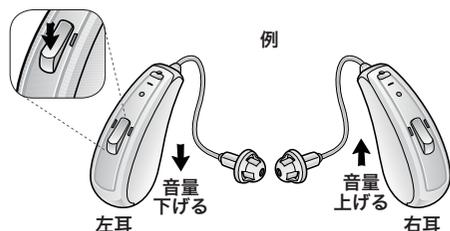

5. 電池残量警告音

補聴器を使用中、またワイヤレス機器を使用中に電池残量の警告音が出ることがあります。警告音が出ると、ワイヤレス機器が使用できなくなったり、補聴器から音が聞こえなくなりますので、充電を行ってください。


| 充電残量 | お知らせ音 | 補聴器 | リモコンⅡ | ボイスリンク テレビリンク フォンリンク スマホアプリ |
|------|--------|-----|-------|--------------------------------------|
| 充電多 | | ○ | ○ | ○ |
| 充電少 | ♪♪♪♪ | ○ | ○ | X |
| 要充電 | ♪♪。♪♪。 | X | X | X |

聞きにくくなる原因のひとつに、セルストップの耳あか詰まりがあります。定期的に交換願います。


セルストップ交換




これでセルストップの交換をします。

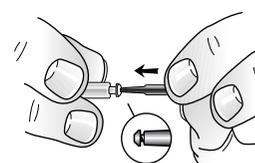


何もついていない細い方を、セルストップにさし込みます。

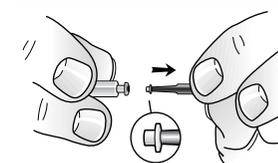


そのままひっぱると、セルストップが抜けます

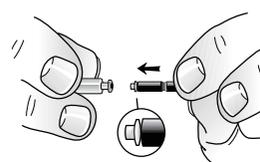

新しいセルストップがついている側をレーザー孔にあわせます。

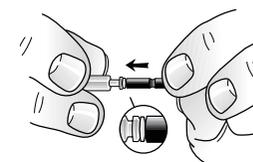

そのままレーザー孔にセルストップをさし込みます。

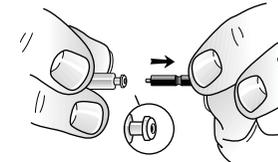

治具をひっぱりレーザー孔にセルストップが残れば完了です。