



# リチウムイオン補聴器充電キット Beltone Serene 62S DWシリーズ

Rechargeable system  
for Hearing Aids

2024.04 Rev.1.0.0

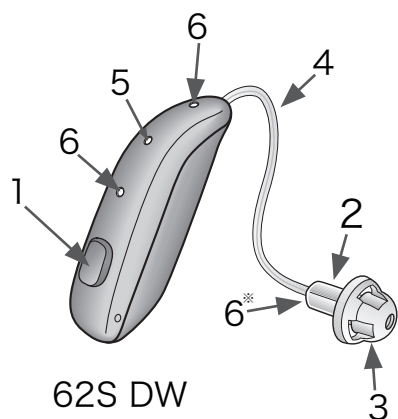


62S DW

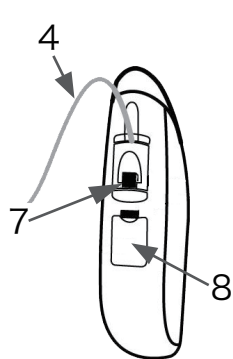


1. メモリーボタン
2. レシーバー (音の出口)
3. 耳せん
4. レシーバーワイヤ
5. 補聴器動作確認用ライト
6. マイク (音の入口)  
※: MRのみ
7. 左右識別マーカー
8. シリアルナンバー

## 補聴器 各部名称

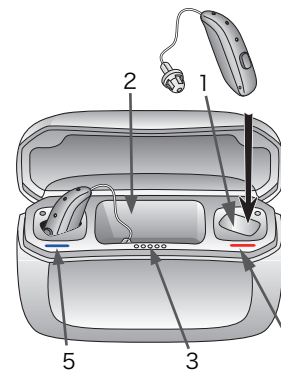

<プレミアム充電器>  
充電用蓄電池内蔵

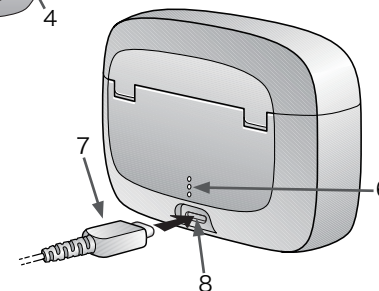

1. 補聴器充電ベイ
2. レシーバー格納ベイ
3. 補聴器充電インジケーター
4. 左右識別マーカー (赤=右)
5. 左右識別マーカー (青=左)
6. 充電器本体内蔵蓄電池用インジケーター
7. USB-Cケーブル\*
8. 充電用ポート


※ 充電用USB-Cケーブルは動作不良や、故障の原因になる可能性がありますので同梱されているケーブルをお使いください。

## 充電器 各部名称

## 充電開始・完了

※ コンセントに接続していないプレミアム充電器に24時間以上補聴器を入れておくと、充電器から取り出しただけでは自動で電源オンにはなりません。その場合は裏面の「1.電源のオン・オフ」を参照の上、再度電源を入れなおしてください。

1. 充電器にUSBケーブルを接続します。充電器内蓄電池と補聴器本体の充電を行います。  
蓄電池：約3.5時間  
補聴器：約3時間。
2. 充電器に補聴器をセットします。補聴器の右左は赤青のマーカーで確認します。
3. 充電が始まると補聴器本体の動作確認ライトが点滅を始めます。
4. 充電が完了すると、補聴器の動作確認ライトが点灯します。また、蓄電池の充電完了は裏面のランプが3つ点灯します。

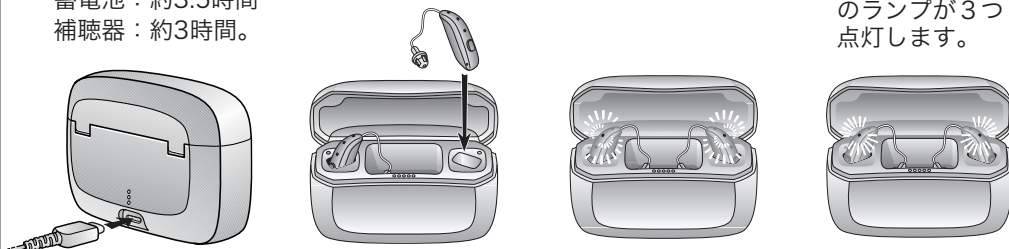

## ランプの状況


※ 両耳で電池容量が違う場合は少ない方が表示されます。

### 1. 充電器内蔵蓄電池 充電状況




LED点灯	電池残量
● 赤色	10% 未満
● 緑色	10 - 32% 充電
●●	33 - 65% 充電
●●●	66 - 99% 充電
●●●● 緑点灯	100% 完了

### 2. 補聴器充電状況確認

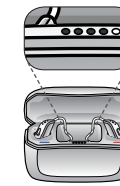

LED点灯	充電電池の残量
●	0 - 20%
●●	20 - 40%
●●●	40 - 60%
●●●●	60 - 80%
●●●●●	80 - 100%

### 3. 補聴器動作確認ランプ

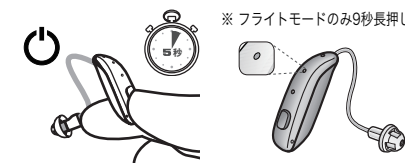

※ フライトモードのみ9秒長押し

動作	LEDライトの状態
電源オン	1回長めの点滅
電源オフ	3回点滅
フライトモード	2回点滅4度繰返し


# リチウムイオン補聴器充電キット Beltone Serene 62SDWシリーズ



## 1. 電源のオン・オフ

通常、充電器へ補聴器の出入れをすることでオン・オフができますが、補聴器使用中にも電源を操作したい場合は、メモリーボタンをオン・オフとも5秒間長押しします。

この時、補聴器のLEDランプが  
オンの時は1回長めの点滅  
オフの時は3回点滅  
します。

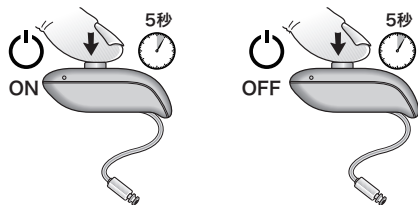


補聴器の操作 1

## 2. メモリーの切り替え


聴こえや聴取環境に応じて、メモリーを最大4つまで設定でき、メモリーボタンで呼び出せます。電源が入った時には必ず1番目のメモリーが出るように設定されています。ボタンを短く押すごとに、2⇒3…と変更でき、その時に「ポーン」という確認音が何回鳴ったかで確認ができます。1秒間以上押しと、ワイヤレス機器モードへ切り換えます。

※ お店での設定が必要となります。

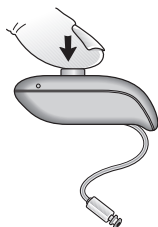


## 3. フライトモード設定

電波の使用や発信を禁じられるような場所に行く場合、「フライトモード」に設定していただく必要があります。メモリーボタンで電源をオフにした後、9秒間メモリーボタンを長押ししてください。「ポポーン ポポーン」と4回聞こえてくるか、LEDランプが2度点滅を4回繰り返せば設定完了となります。

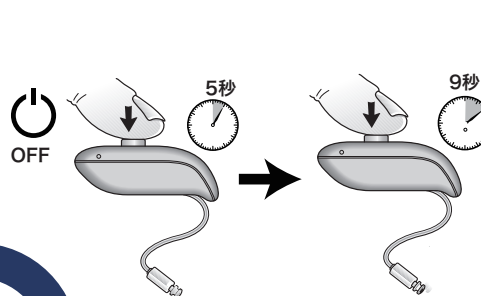

フライトモードを解除したい場合は、電源をオフにした後に再度通常通りオンにします。(電源操作の仕方については「1. 電源のオン・オフ」をご参照ください。)

※ フライトモードを使用する場合は、お店での設定が必要となります。

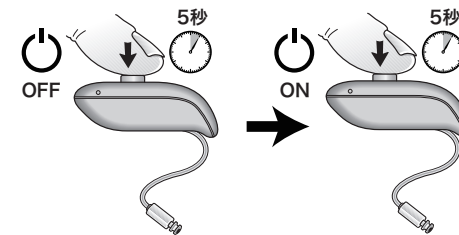


補聴器の操作 2

## 補聴器の操作 3

### 4. 音量調整

ボリュームボタンが無い補聴器ですので基本的にはリモコンやスマホのアプリでの変更となります。両耳装用の場合はメモリーボタンの長押しで、片側で音量を上げる、もう一方の補聴器で下げるの設定が可能です。

※ お店での設定が必要となります。

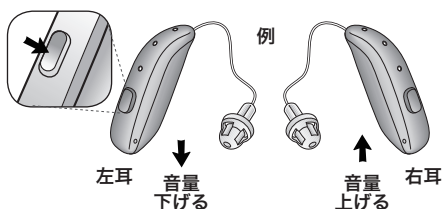


### 5. 電池残量警告音

補聴器を使用中、またワイヤレス機器を使用中に電池残量の警告音が出ることがあります。警告音が出ると、ワイヤレス機器が使用できなくなったり、補聴器から音が聞こえなくなりますので、充電を行ってください。


充電残量	お知らせ音	補聴器	リモコンII	ボイスリンク テレビリンク フォンリンク スマホアプリ
充電多		○	○	○
充電少	♪♪♪♪	○	○	X
要充電	♪♪。♪♪。	X	X	X

聞きにくくなる原因のひとつに、ワックスフィルターの耳あか詰まりがあります。定期的に交換願います。


## ワックスフィルター交換

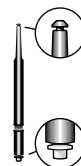


これでワックスフィルターの交換をします。

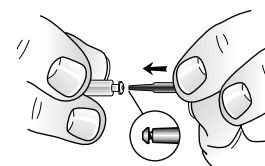


何もついていない細い方をワックスフィルターにさし込みます。

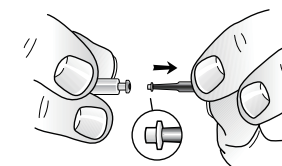


そのままひっぱると、ワックスフィルターが抜けます。

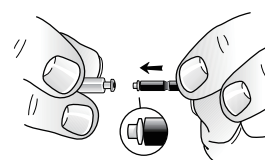

新しいワックスフィルターがついている側をレシーバー一孔にあわせて。

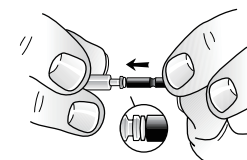

そのままレシーバー孔にさし込みます。

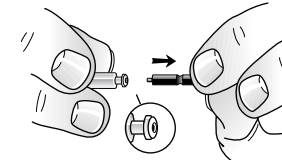

治具をひっぱりレシーバー孔にワックスフィルターが残れば完了です。