
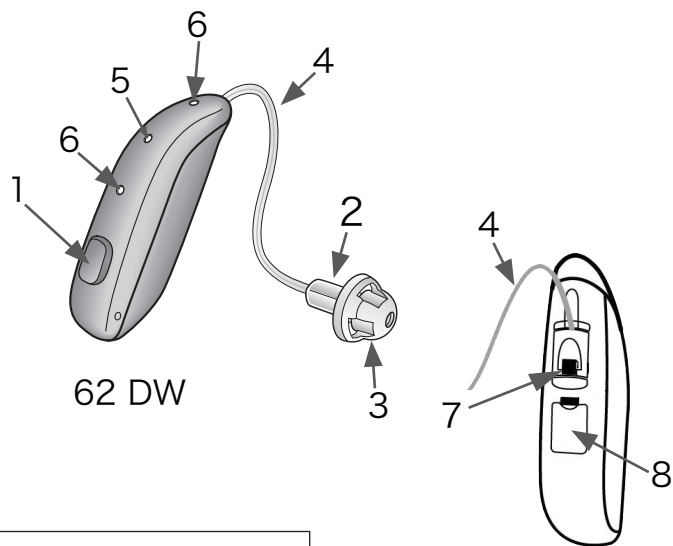



リチウムイオン補聴器充電キット Beltone Commence 62 DW

Rechargeable system
for Hearing Aids
2025.08 Rev.1.0.0

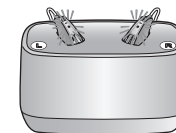


1. メモリーボタン
2. レシーバー（音の出口）
3. 耳せん
4. レシーバーワイヤ
5. 補聴器動作確認用ライト
6. マイク（音の入口）
7. 左右識別マーカー
8. シリアルナンバー

補聴器 各部名称

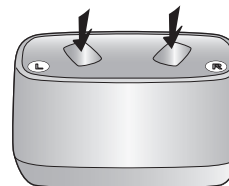

<デスクトップ充電器>

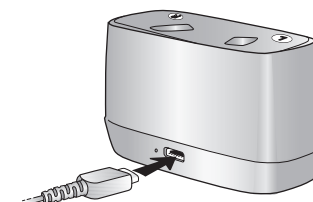

1. 補聴器充電ベイ
2. 左右識別マーカー（赤＝右）
3. 左右識別マーカー（青＝左）
4. 充電器通電用インジケーター
5. USB-C ケーブル※
6. 充電用ポート

※ USB-C ケーブルについて
充電不良や、故障の原因に
なる可能性がありますので
必ず同梱されているものを
お使いください。

充電器 各部名称

充電開始・完了


1. 充電器にケーブルを差し込み反対側をコンセント等に差し込んで充電できるようにします。

2. 充電器に補聴器をセットします。右左は充電器上赤青のマーカーで確認します。

3. 充電が始まると補聴器の動作確認ライトが点滅を始めます。


4. フル充電されると補聴器の動作確認ライトが点灯します。充電完了までは約3時間です。

※ デスクトップ充電器は、充電器本体に充電電池は入っておりません。USB-C ケーブルをコンセント等に差し込んでご使用いただきます。コンセント等に差し込まれていないと、補聴器には充電されませんのでご注意ください。

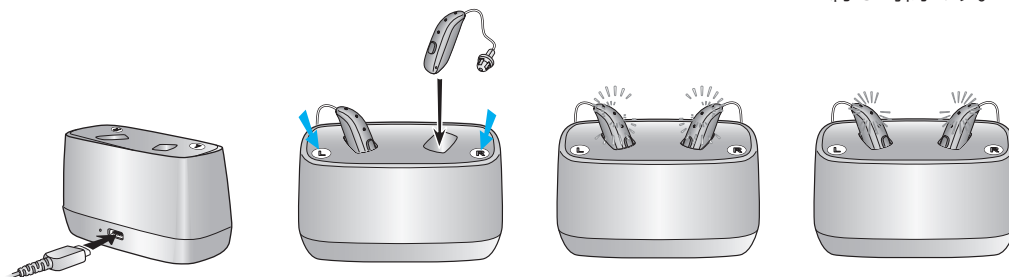

ランプの状況

補聴器動作確認ランプ

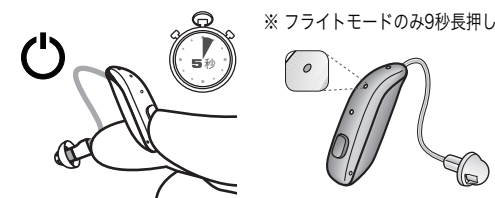


※ フライトモードのみ9秒長押し

動作	LEDライトの状態
電源オン	1回長めの点滅
電源オフ	3回点滅
フライトモード	2回点滅4度繰返し

リチウムイオン補聴器充電キット Belton Commence 62 DW


Rechargeable system
for Hearing Aids
2025.08 Rev.1.0.0

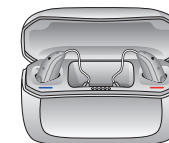

1. 電源のオン・オフ

通常、充電器へ補聴器の出入れをすることでオン・オフができますが、補聴器使用中にも電源を操作したい場合は、メモリーボタンをオン・オフとも5秒間長押しします。


この時、補聴器のLEDランプが
オンの時は1回長めの点滅
オフの時は3回点滅
します。

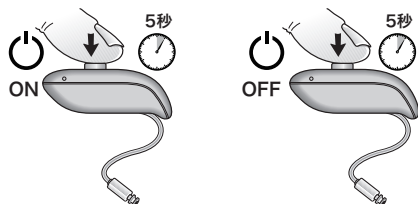

補聴器の操作 1


2. メモリーの切り替え

聴こえや聴取環境に応じて、メモリーを最大4つまで設定でき、メモリーボタンで呼び出せます。電源が入った時には必ず1番目のメモリーが出るように設定されています。初期設定ではボタンを片耳装用は短く、両耳装用は右耳を1秒長押しごとにメモリー2⇒3…と変更され、その時に「ポーン」の確認音が何回かで何番目になったかの確認ができます。また左耳を2秒間押すと、ワイヤレス機器モードへ切り変わります。

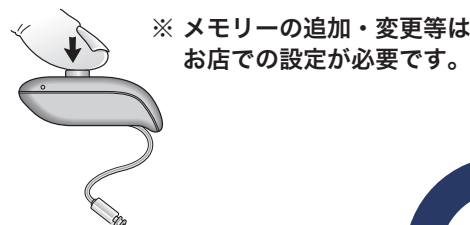


3. フライトモード設定

電波の使用や発信を禁じられるような場所に行く場合、「フライトモード」に設定していただく必要があります。メモリーボタンで電源をオフにした後、9秒間メモリーボタンを長押ししてください。「ポポーン ポポーン」と10回聞こえてくるかLEDランプが2度点滅を4回繰り返せば設定完了となります。

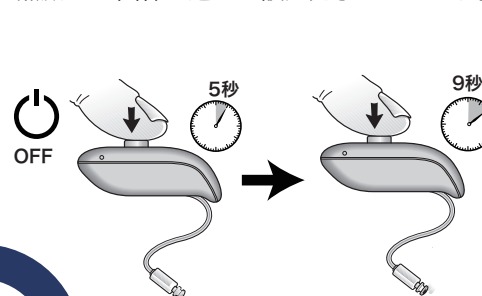

フライトモードを解除したい場合は、電源をオフにした後に再度通常通りオンにします。（電源操作の仕方については「1. 電源のオン・オフ」をご参照ください。）

※フライトモードを使用する場合は、お店での設定が必要となります。

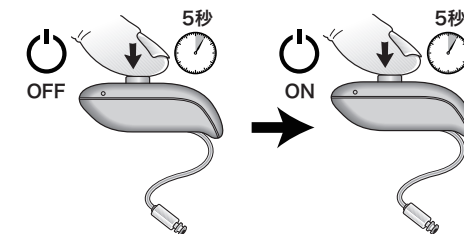


補聴器の操作 2

補聴器の操作 3

4. 音量調整

ボリュームボタンが無い補聴器です。基本的には、リモコンやスマホのアプリでの変更となります。両耳装用の初期設定は、メモリーボタンを短押しすると右耳で音量を上げる、左耳で音量を下げるの設定となっています。

※変更するにはお店での設定が必要となります。

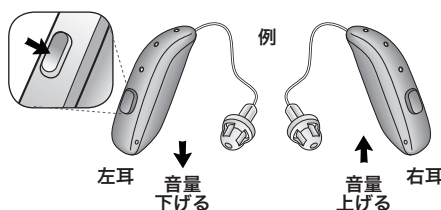


5. 電池残量警告音


補聴器を使用中、ワイヤレス機器を使用中に電池残量のお知らせ（警告）音が出ることがあります。しばらくすると、ワイヤレス機器が使用できなくなったり、補聴器から音が聞こえなくなるため、できるだけ早めに充電を行ってください。

充電残量	お知らせ音	補聴器	ミニリモコン	TVストリーマー+マルチマイク+ボイスリンクテレビリンクII スマホアプリ
充電多		○	○	○
充電少	♪♪♪	○	○	X
要充電	♪♪♪	X	X	X


聞きにくくなる原因のひとつに、ワックスフィルターの耳あか詰まりがあります。定期的に交換願います。

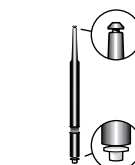


これでワックスフィルターの交換をします。

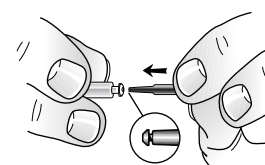


何もついていない細い方をワックスフィルターにさし込みます。

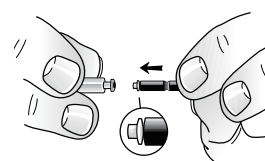


新しいワックスフィルターがついている側をレシーバー一孔にあわせます。

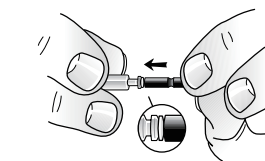

そのままレシーバー孔にさし込みます。

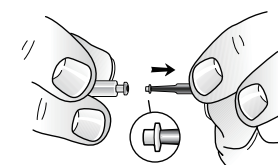

そのままひっぱると、ワックスフィルターが抜けます。

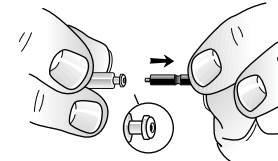

治具をひっぱりレシーバー孔にワックスフィルターが残れば完了です。