
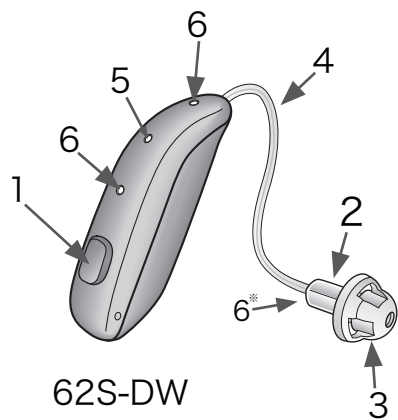


リチウムイオン補聴器充電キット Beltone Envision 62S-DW

Rechargeable system
for Hearing Aids


2025.08 Rev.1.0.0

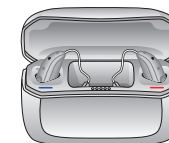


62S-DW

1. メモリーボタン
2. レシーバー（音の出口）
3. 耳せん
4. レシーバーワイヤ
5. 補聴器動作確認用ライト
6. マイク（音の入口）
※：MRのみ
7. 左右識別マーカー
8. シリアルナンバー

補聴器 各部名称

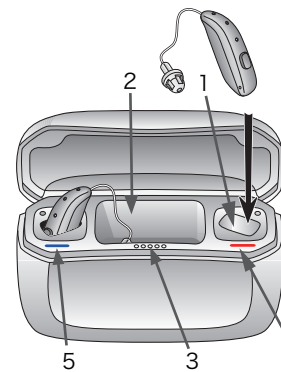

<プレミアム充電器>
充電用蓄電池内蔵

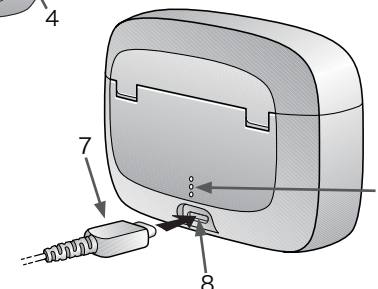

1. 補聴器充電ベイ
2. レシーバー格納ベイ
3. 補聴器充電インジケーター
4. 左右識別マーカー（赤＝右）
5. 左右識別マーカー（青＝左）
6. 充電器本体内部蓄電池用インジケーター
7. USB-C ケーブル*
8. 充電用ポート


※ 充電用USB-C ケーブルは動作不良や、故障の原因になる可能性がありますので同梱されているケーブルをお使いください。

充電器 各部名称

充電開始・完了

※ コンセントに接続していないプレミアム充電器に 24 時間以上補聴器を入れておくと、充電器から取り出ただけでは自動で電源オンにはなりません。その場合は裏面の「1. 電源のオン・オフ」を参照の上、再度電源を入れなおしてください。


1. 充電器にUSBケーブルを接続します。充電器内蓄電池と補聴器本体の充電を行います。
蓄電池：約3.5時間
補聴器：約3時間。

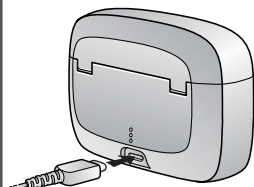


2. 充電器に補聴器をセットします。補聴器の右左は赤青のマーカーで確認します。



3. 充電が始まると補聴器本体の動作確認ライトが点滅を始めます。

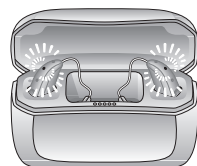

4. 充電が完了すると、補聴器の動作確認ライトが点灯します。また、蓄電池の充電完了は裏面のランプが3つ点灯します。

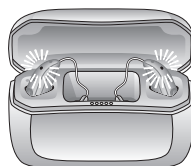

1. 充電器内蔵蓄電池 充電状況



LED点灯	電池残量
● 赤色	10% 未満
● 緑色	10 - 32% 充電
● ●	33 - 65% 充電
● ● ●	66 - 99% 充電
● ● ● ● 緑点灯	100% 完了

2. 補聴器充電状況確認



LED点灯	充電電池の残量
●	0 - 20%
● ●	20 - 40%
● ● ●	40 - 60%
● ● ● ●	60 - 80%
● ● ● ● ●	80 - 100%


ランプの状況

3. 補聴器動作確認ランプ



※ フライトモードのみ9秒長押し


動作	LEDライトの状態
電源オン	1 回長めの点滅
電源オフ	3 回点滅
フライトモード	2 回点滅 4 度繰返し

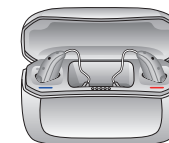

1. 電源のオン・オフ

通常、充電器へ補聴器の出入れをすることでオン・オフができますが、補聴器使用中にも電源を操作したい場合は、メモリーボタンをオン・オフとも5秒間長押しします。


この時、補聴器のLEDランプが
オンの時は1回長めの点滅
オフの時は3回点滅
します。

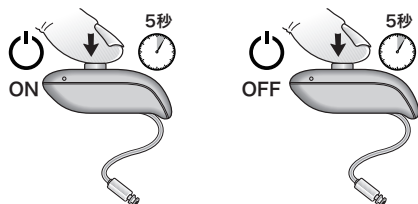

補聴器の操作 1

2. メモリーの切り替え


聴こえや聴取環境に応じて、メモリーを最大4つまで設定でき、メモリーボタンで呼び出せます。電源が入った時には必ず1番目のメモリーが出るように設定されています。初期設定ではボタンを片耳装用は短く、両耳装用は右耳を1秒長押しごとにメモリー2⇒3…と変更され、その時に「ポーン」の確認音が何回かで何番目になったかの確認ができます。また左耳を2秒間押すと、ワイヤレス機器モードへ切り変わります。

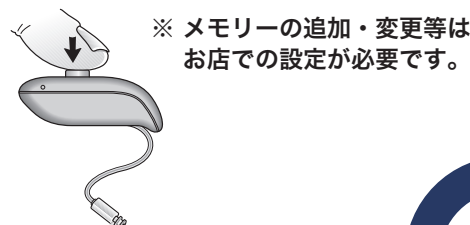

※メモリーの追加・変更等は
お店での設定が必要です。


3. フライトモード設定

電波の使用や発信を禁じられるような場所に行く場合、「フライトモード」に設定していただく必要があります。メモリーボタンで電源をオフにした後、9秒間メモリーボタンを長押ししてください。「ポポーン ポポーン」と10回聞こえてくるかLEDランプが2度点滅を4回繰り返せば設定完了となります。

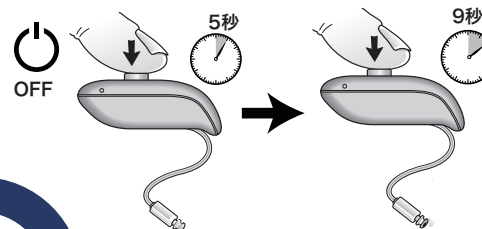

フライトモードを解除したい場合は、電源をオフにした後に再度通常通りオンにします。（電源操作の仕方については「1. 電源のオン・オフ」をご参照ください。）

※フライトモードを使用する場合は、お店での設定が必要となります。

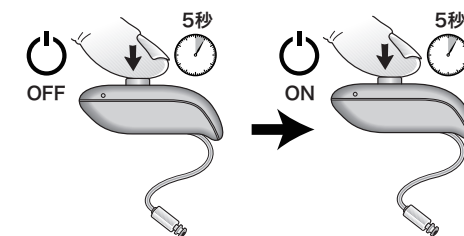


補聴器の操作 2

補聴器の操作 3

4. 音量調整

ボリュームボタンが無い補聴器です。基本的には、リモコンやスマホのアプリでの変更となります。両耳装用の初期設定は、メモリーボタンを短押しすると右耳で音量を上げる、左耳で音量を下げるの設定となっています。

※変更するにはお店での設定が必要となります。

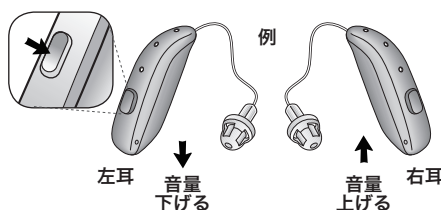


5. 電池残量警告音


補聴器を使用中、ワイヤレス機器を使用中に電池残量のお知らせ（警告）音が出ることがあります。しばらくすると、ワイヤレス機器が使用できなくなったり、補聴器から音が聞こえなくなるため、できるだけ早めに充電を行ってください。

充電残量	お知らせ音	補聴器	ミニリモコン	TVストリーマー+マルチマイク+ボイスリンクテレビリンク II スマホアプリ
充電多		○	○	○
充電少	♪♪♪	○	○	X
要充電	♪♪♪	X	X	X


聞きにくくなる原因のひとつに、ワックスフィルターの耳あか詰まりがあります。定期的に交換願います。

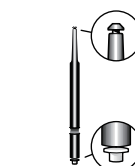


これでワックスフィルターの交換をします。

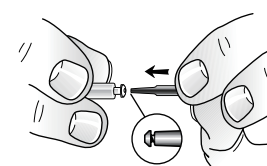


何もついていない細い方をワックスフィルターにさし込みます。

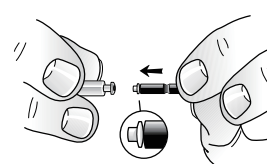


新しいワックスフィルターがついている側をレシーバー一孔にあわせます。

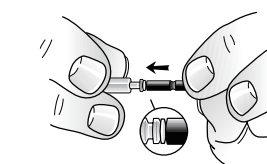

そのままレシーバー孔にさし込みます。

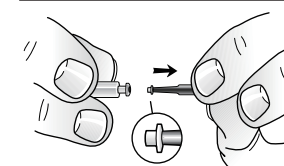

そのままひっぱると、ワックスフィルターが抜けます。

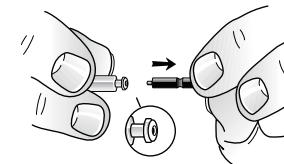

治具をひっぱりレシーバー孔にワックスフィルターが残れば完了です。