

お使いになる前に... Vivante / Blu / DX / D 各シリーズと Moxi All では Bluetooth 対応のすべての携帯電話と直接無線通信をおこなうことができます。
さらに「リモートプラス」アプリをインストールすると、スマートフォンをリモコンとして使用したり、TV コネクター等の音量バランスを調整する事が出来るようになります。

STEP 1 補聴器とデバイスのペアリング

① Bluetooth機能をONにする

iPhone



「設定」を開き、「Bluetooth」をタップします。

② デバイス(補聴器)の登録をする



「Bluetooth」をオンにし、補聴器の電源を入れます。
次にデバイスに出てくる「右(左)-Untron補聴器」をタップします。

もしこの画面が表示されたら...



「ペアリング」をタップしてください



「接続済み」になったら、画面を閉じて下さい。
これでデバイスと補聴器のペアリングが完了しました。
電話をハンズフリーにてお使いいただけます。

Android

① Bluetooth機能をONにする



「設定」→「その他の設定」→「Bluetooth」とタップし、Bluetoothを「ON」にします。

② デバイス(補聴器)の登録をする

(①)の画面で補聴器の電源を入れます。
→ 使用可能デバイスを検索し
→ 右(左)-Unitronを選択・接続します。

☞ 登録が完了しました。

Androidにつきましては、別冊の接続マニュアルをご用意しております。そちらも参照ください。

※「ハンズフリープロフィール」に対応していない機種については、接続ができません。

従来の携帯電話



① Bluetooth機能をONにする

「メニュー」→「ツール」→「外部接続」→「Bluetooth」→「On/Off設定」→「On」の順に選びます。

② デバイス(補聴器)の登録をする

Bluetooth画面内の「デバイス登録」→「OK」→「検索」→登録一覧の中に、「Unitron @Hearing aid」が表示されます。
「登録」をクリック→「Unitron @Hearing aid をデバイスリストに加えますか?」→「はい」☞ 登録完了です。

③ 補聴器のハンズフリー機能を常に使用可能にする

「登録済みデバイス」→「メニュー」→「接続サービス」の選択→「ハンズフリー機能」を選択→「接続」→ハンズフリー機能部分には「接続済み」と表示
☞ 登録が完了しました。

※ ハンズフリープロフィールに対応していない機種については、接続ができません。

～両耳の補聴器のペアリング～

※ 電話を使用する為のハンズフリーのペアリングは、片方の補聴器のみの接続になります。なお、通話音声については Vivante / Blu / DX / D の各シリーズは両耳から、Moxi Allは片耳から聞こえてきます。

※ 両耳に補聴器を装用の場合、リモートプラスアプリへのペアリングは「両耳」ともペアリングを行って下さい。

※ 携帯の機種によって操作方法や文言が異なる場合がございます。詳細は携帯各メーカー・販売店にお問い合わせください。

STEP2 補聴器とアプリのペアリング

【リモートプラスのダウンロード】

「App Store」または「Play Store」から入手できます。

Unitron Remote Plus

で検索してください。


リモートプラスアプリは
iOS Ver.15.0以降のApple iPhone
Android OS Ver.8.0以降のAndroid
スマートフォンで機能します。




「RemotePlus」のアイコンをタップします。



「続ける」をタップします。

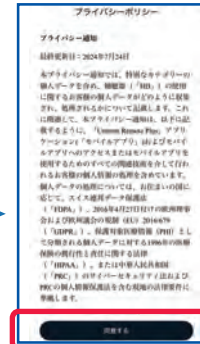

「同意する」をタップします。

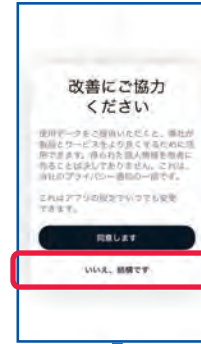


「いいえ、結構です」をタップします。

補聴器の再起動

を行い、「続ける」をタップします。
※ 電池仕様タイプはバッテリーロッカーの開閉で対応できます。

【充電タイプ補聴器 電源の再起動方法】

- 電源オフ
下のボタンを3秒程長押し (Vivante / Bluは4秒) = LEDライトが赤で点灯 → 消灯
- 電源オン
下のボタンを3秒程長押し = LEDライトが緑で点滅 → 消灯

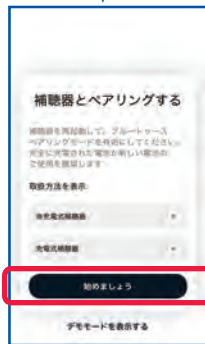


補聴器の検出が始まります。検出されたら、「>」部分をタップします。



「ペアリング」をタップします。(両耳の場合は2回出てきます)




「接続しました」が表示されます。しばらく待つと次の画面に移動します。

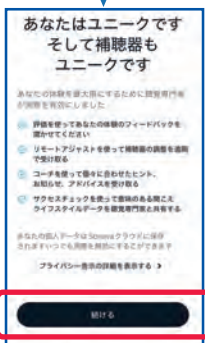

「続ける」をタップします。



「OK」をタップします。次ページでは「許可する」をタップします。

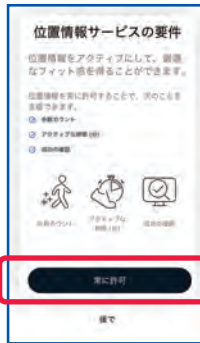

「常に許可」をタップします。次ページでは「アプリの使用中は許可」その次は「常に許可」に変更」をタップします。



アプリ画面のモード変更を行う画面です。通常はこのままで「確認する」をタップします。



「確認する」をタップします。しばらく待つと調整画面になります。

アプリとペアリングができないとき 以前にも「Remort Plus」で補聴器をペアリングしたことがある場合、うまく再ペアリングができない場合があります。その時は「アプリ」内と、携帯の「設定」⇒「Bluetooth」から接続情報を削除し、改めてアプリ内から補聴器のペアリングを行うことで接続がスムーズにできます。

携帯で行うこと

※ これは iPhone の画面になります。Android 機は、それぞれメーカーのやり方に従ってください。




「設定」
をタップします。



「Bluetooth」
をタップします。



「LE_○_Unitron 補聴器」
の青い「!」アイコン
をタップします。

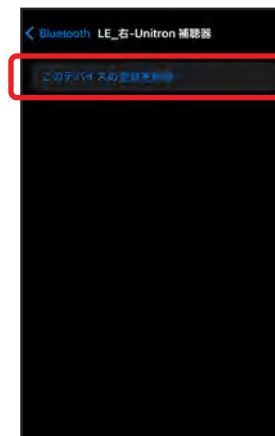

「このデバイスの登録を解除」
をタップします。


アプリで行うこと



下部、「補聴器」
をタップします。



「私の補聴器」
をタップします。

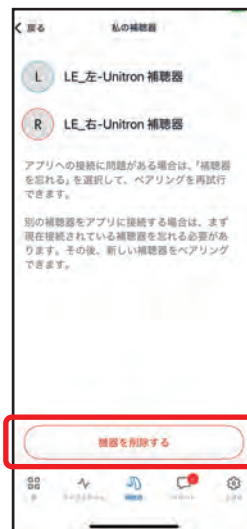

「機器を削除する」
をタップします。



再度ペアリングの
画面になります。
「始めましょう」
をタップします。

【「Remort Plus」の機能】

「Remort Plus」には大別して5つの画面があり、それぞれ画面下のナビゲーションメニューから開くことができます。

① 家（ホーム画面）



基本の画面です。この画面から簡単にプログラムの切り替えや音質調節等の画面に移動できます。下部の「ホーム」ボタンをタップするといつでもこの画面に戻れます。

② ライフスタイル



各環境下でどれくらい使用しているかを確認できます。画面を下の方に送ると歩数や身体を動かした時間が確認できます。



③ 補聴器



オプションを使用して補聴器の設定変更ができます。「タップコントロール」「オート電源オン」「環境適応型Bluetooth」「リモートアジャスト」「私の補聴器」にて調整可能。

④ サポート



補聴器を使用する上でのヒントや操作方法の動画などが確認可能。

⑤ 上げる（アプリ設定画面）



それぞれの項目でアプリの設定が変更できます。「アプリモード」「様子」「洞察設定」「分析」「デモモード」

【プログラムの切替え】



【現在のプログラム】
アイコン部分を左右にスワイプするとプログラムの切替え可能。



【ボリューム調節】



スライダーを左右に動かしてボリューム調節ができます。

ここをタップすると、左右別々にボリュームの調節と消音/出音ができます。

ミュートボタンです。タップすると消音にできます。再度タップすると戻ります。



【クイックボタン】



「普通」「快適性」「明瞭性」で切り替えが可能です。切り換えたい所をタップします。




「普通」 初期状態。変化なし
「快適性」 周りが騒がしくて、人の声がない状態で周りの騒音を下げたい時。


「明瞭性」 騒音を抑えつつ、人の言葉をはっきりさせたい時。子音強調。



「低 / 中 / 高音調節」、「指向性幅」、「子音強調」、「雑音抑制」を設定できます。



アイコン部のをタップします。

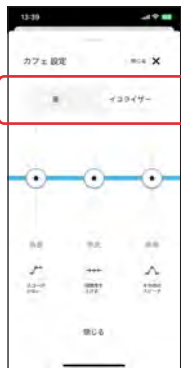

「音」
「イコライザー」
を切り換えて調整
します。



イコライザー

【フォーカスマイク】

指向性の幅を調節し、聞きたい範囲を選択できます。



左右にスライドして
調節できます。

フォーカスマイク



ワイド



フォーカス



音


イコライザー

【低音 / 中音 / 高音】

低音域 / 中音域 / 高音域のバランスを調節できます。



それぞれ上下に
調節が可能です。

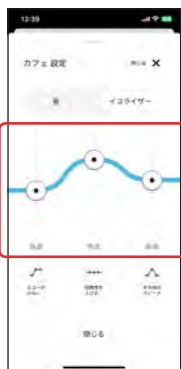

【会話を強調】

子音を強調することで言葉をよりはっきりさせます。



会話を強調

下げる
やわらかい




上げる
はっきり



【プリセット】

ボタンのワンタップで調節できるプリセット調整もあります。

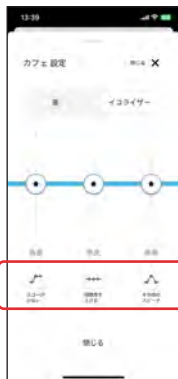

3つのプリセットの
ひとつをタップし
ます。



タップした音質に
なりました。
ここから微調整も可能
です。

【ノイズを削減】（雑音抑制）

環境音を抑制し、快適さと言葉の聞き取りやすさを確保します。




ノイズを削減

下げる
環境音入る



上げる
かなり静か

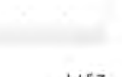

【プログラムを管理】

ご自分の欲しいプログラムを下記どちらかの方法で任意追加できます。
7つすべての追加も可能です。（車内360度は両耳装着時のみ表示）



「プログラムを管理」
をタップします。



追加したいプログラムの
名称部をタップします。

追加したいプログラム
の「+」をタップします。





そのプログラムの
プレビューが表示
され、動作確認後
追加（保存）する
かどうか選べます。



プログラムがワンタッチ
で追加できます。

【プログラム名変更】

わかりやすい名称に変更できます。

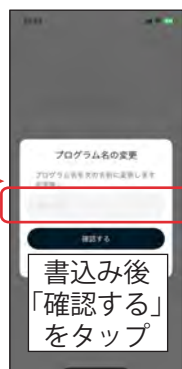
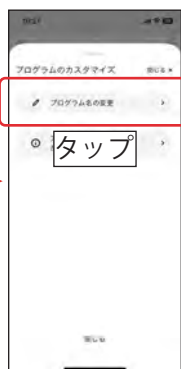


書込み後
「確認する」
をタップ




【追加プログラム削除】

追加したプログラムを削除します。（追加プログラムのみ。元プログラムでは表示なし）

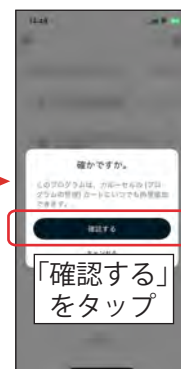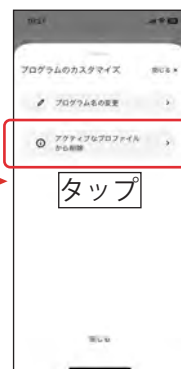

確認する
をタップ

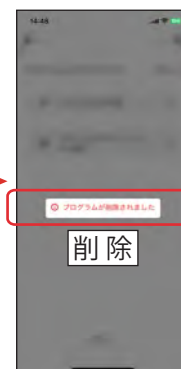

削除

【聞こえ体験】

現在の聞こえ方を、アイコン等で販売店へお知らせする機能（要 店舗での設定）



タップ




選択



選択



選択

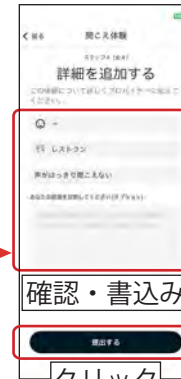

クリック

【その他】

「アプリモード」：以前のモードを好まれる方に



以前と違う部分：
クラシックモードでは、「低・中・高」での調整ができません。
可能なのはアドバンスドモードのみです。

【その他】

「様子」：画面のカスタマイズ



プログラム部分に写真を使うかどうかや背景色の変更を選択します。
「表示を合わせる」をタップしてオフにするとアプリ内での変更が可能となります。
オンのままだとスマートフォンの設定と同じ状態になります。アプリ内のみの変更はできません。

【その他】

環境適用型Bluetoothのオンオフ



※もしBluetooth接続の音声（通話/ストリーミング）がブツブツ切れたり音質が悪い場合は、ここを開いて「環境適用型Bluetooth」を「オフ」にしてみてください。

【その他】

補聴器で電話等を取る場合の設定（iPhoneの場合）



1. 「設定」⇒「アクセシビリティ」⇒「タッチ」⇒「通話オーディオルーティング」の順でタップします。
2. 「Bluetoothヘッドセット」をタップします。

※ iPhone専用のやり方です。Android機は、それぞれでやり方が違う可能性があります。
ご使用の機種種の取扱説明書に沿って設定をお願いいたします。