




【ご使用上の注意点】

ベルトーンミニリモコンを使用するときは、補聴器からなるべく近く（1m以内）でご使用いただくことを推奨します。またポケットの中などで操作されると反応しない可能性がありますので、必ずポケット等からは出してご使用ください。

※ 使用可能器種：プロミス以降の製品


【各部の名称】

- ① お知らせインジケータランプ
- ② ボリューム（大きく）
- ③ ボリューム（小さく）
- ④ プログラムボタン

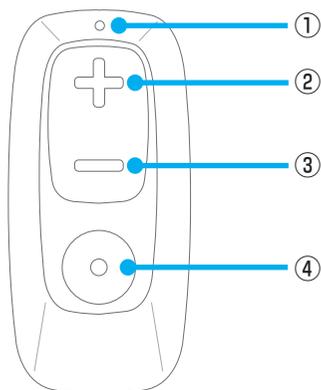

- ⑤ 電池ケース
- ⑥ ペアリングボタン
- ⑦ ストラップ穴

※ ミニリモコンには、本体のON - OFF スイッチはありません。

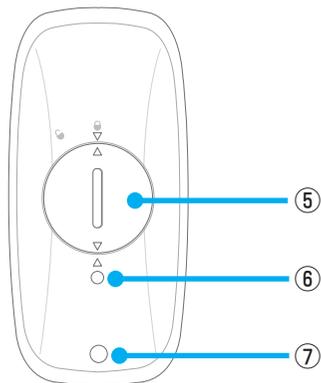


【ボタン操作】

<音量調節>

補聴器のボリューム操作をしたい場合は、ボリューム「+」(②) または「-」(③) を希望の音量まで複数回押してください。

- ・ ボタンの上 (+) を押すと音が大きくなります。
- ・ ボタンの下 (-) を押すと音が小さくなります。

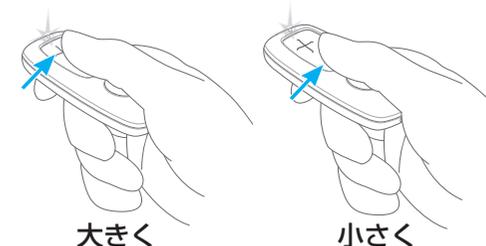

※ 「-」側を **1秒以上**長押しすると**消音状態**にできます。解除する場合は、「+」「-」ボタンいずれかを短押しします。


<プログラムの変更>

補聴器のプログラムを変更したい場合はプログラムボタン(④)を押します。



<ワイヤレス機器の使用>

別売オプションのワイヤレス機器（テレビリンクⅡ・ボイスリンクプロ / マイクロ）をお使いの場合は、プログラムボタン(④)を「ブルブル」という切替音が聞こえるまで**1秒以上**長押ししてください。ワイヤレスモードの解除は、プログラムボタン(④)を**短押し**します。

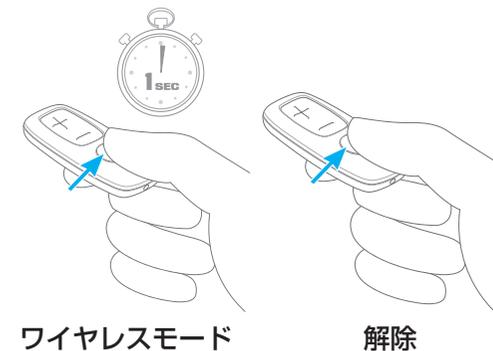



! ペースメーカーを使用
されている方へご注意
**必ず心臓から15cm以上
離してご使用ください**


【ミニリモコンをロックする】

ミニリモコンをバッグやポケット等に入れて持ち運ぶ場合、操作をロックすることで誤動作を防ぐ事ができます。

<ロックする>

ボリュームボタン「-」(③)とプログラム切替ボタン(④)を同時に**5秒以上**長押しすると、ミニリモコンがロックされます。

ロックされたら、お知らせインジケータランプ(①)が**3回**点滅します。

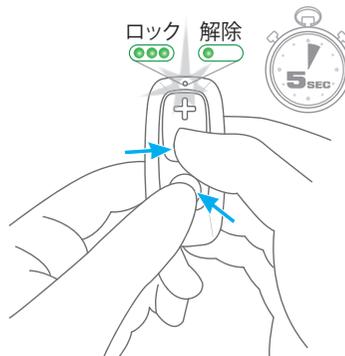

<ロック解除する>

<ロックする>と同じ手順を繰り返します。解除されるとお知らせインジケータランプ(①)が**1回**点滅します。


※ ロックされている間は、各ボタンを押すことにお知らせインジケータランプ(①)が3回点滅しますが、音量等は変更されていません。

【ペアリングする】

ご使用中に、何らかの原因でペアリングが外れてしまったような場合は、下記の手順にて再度ペアリングを行ってください。(通常は、お渡し時に販売店で補聴器とのペアリングが完了しております。)

(1) 補聴器の電源を「オフ」にします。ミニリモコンの裏面にある「ペアリングボタン」(⑥)を先の細いペン先などで押します。お知らせインジケータランプ(①)が2秒おきに点滅を始め、20秒間ペアリングモードとなります。


(2) 補聴器の電源を「オン」にします。補聴器をミニリモコンのそばに置き、しばらく待ちます。お知らせインジケータランプ(①)が**点滅→点灯→消灯**となったらペアリング完了です。

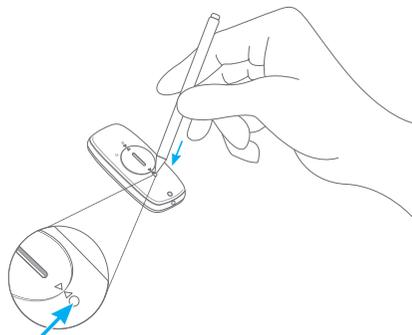


【本体電池交換】

ミニリモコンは、市販の「CR 2032」コイン型リチウム電池を使用します。交換用の電池は、最寄りの電気店等でお求めください。電池寿命は、使用状況にもよりますが約1年です。


(1) コインを使い、電池ケース(⑤)のカバーを左方向(☺→☻)へ回して開きます。

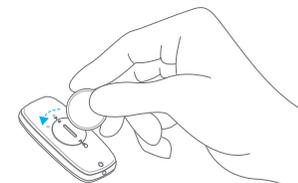

(2) 古い電池を取出し、新しい電池を入れます。この時「+」側(平らな面)が上になるように入れます。

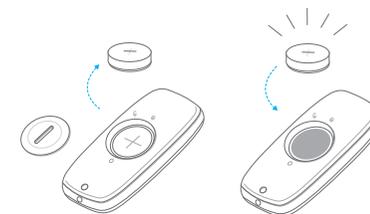

(3) 電池ケース(⑤)のカバーをかぶせ、右方向(☻→☺)へ回して閉めます。

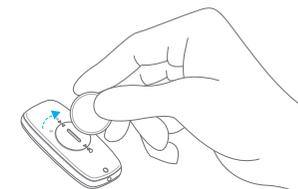

(4) カバーが確実に閉まっているかを確認します。カバー部分、上下の矢印マークが向き合った位置にあると、確実に閉まっています。マークがずれていると、確実に閉まっています。また、本体を水平に見ていただきカバーが本体から浮いていないか確認します。もし浮いている場合は、確実に閉まっています。

