




! ペースメーカーを使用
されている方へご注意
ご使用に関しましては、
専門医へご相談ください

【お使いの前に】


リモコンをご使用になる前に、電池ボックスから出ている保護タブを抜き去ってください。

※ 使用可能器種は、**Vivante / Blu / DX**の各シリーズとなります。他の補聴器は、仕様が違うため対応していません。あしからずご了承ください。

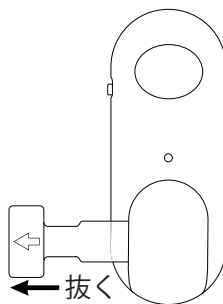

【各部の名称】

- ① 音量ボタン
- ② メモリー切換えボタン
- ③ 表示用LEDランプ
- ④ 本体 オン/オフ スイッチ
- ⑤ 電池カバーストッパー
- ⑥ 電池カバー

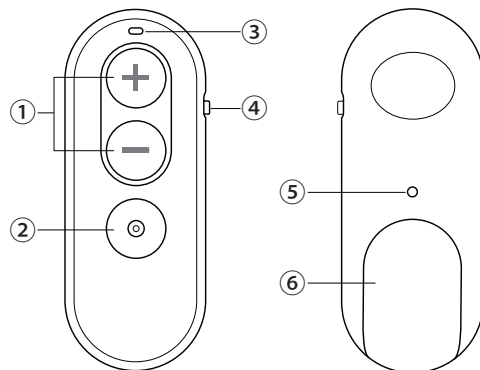

【表示用LEDランプの表示色】


リモコンをご使用いただく中で、表示用LEDランプが点灯した場合下記の意味があります。

	緑色で3秒間点灯	スイッチオン、使用できます
	青色で点滅	ペアリングモード（最長3分間）
	緑色で5秒間点灯	ペアリング成功
	赤色で5秒間点灯	ペアリング失敗
	緑色で1秒間点灯	プッシュボタンが押されるごとに点灯
	オレンジ色に点灯	電池に関する警告
	赤色に点灯	機器の一般的なエラー（リセットが必要）
	緑色で3秒間点灯	リセット成功

【各部操作方法】


各ボタンの操作についてです。

電源のオン/オフを行います。
上下にスライドさせて使用し、
下がオフ・上がオンになります。

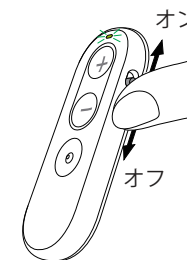


ボリューム操作ボタンです。

「+」：音量が上がります。
「-」：音量が下がります。

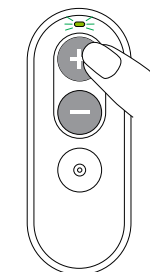

メモリー切換えボタンです。


あらかじめ手動用メモリーが設定済みであれば、このボタンで変更が可能。
切り替わると、補聴器からビープ音が聞こえますので現在のメモリーが何番めかがわかります。

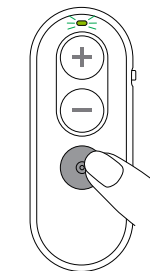

【リモコンをリセットする】

何かの拍子で急にリモコンが作動しなくなったり、表示用LEDランプが赤色点灯になった場合は、リセットしてみます。

「+」ボタンとメモリー切換えボタンを同時に10秒以上押すことでリセットができます。
リセットに成功すると表示用LEDランプが緑色で3秒間点灯します。

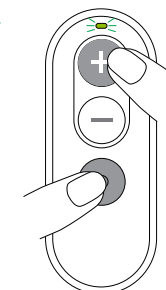




! ペースメーカーを使用
されている方へご注意
ご使用に関しましては、
専門医へご相談ください


【電池を交換する】

電池がなくなったら交換をする必要があります。
市販の「CR-2032」電池を使用します。
電池寿命は使用状況にもよりますが、約1年です。


① 電池カバーを開けるために、ストッパーをペン先など先のとがったもので押しなが
ら電池カバー部分をスライドさせます。
電池カバーが引き出せたら、上へ倒して
開きます。

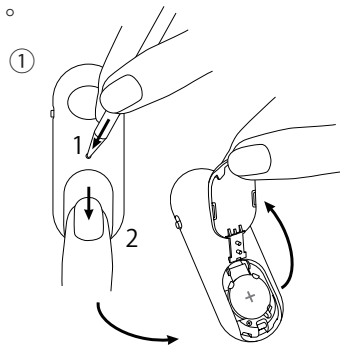


② 電池右下にくぼみがありますので、先のとがった硬いものをさしこみ、電池側に
少し押しなが
ら軸を手前に倒すよう
にすると電池がはずれます。

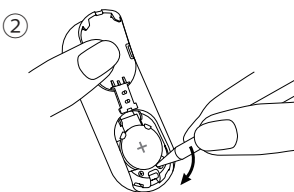

③ 古い電池がはずれたら、新しい電池を奥からさしこみストッパーにひっかけます。

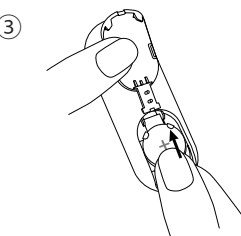

④ 電池カバーを倒し、スライドさせてはめこみます。この時、「カチッ」と音がするまでスライドさせてください。

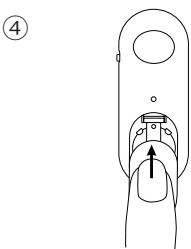


※ これで電池の交換ができました。


【補聴器とのペアリング】

初期設定は、ご購入のお店で行われていると思いますが、使用中に何らかの原因でペアリングがはずれた場合は、下記要領で行ってください。


① 補聴器を充電器から取り出すか、背面のメモリーボタン下側を長押しして、電源オンにします。

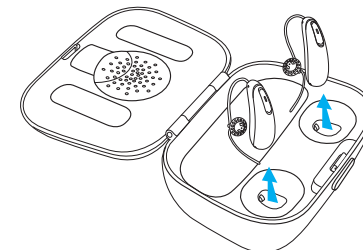

② 「+」ボタンを押しながら、リモコンの電源スイッチをスライドさせて「オン」にします。

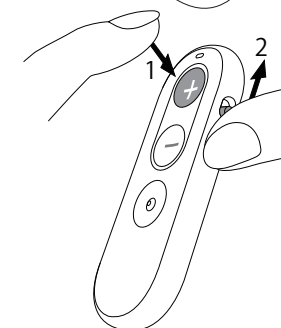

③ 電源オンになると、青色の点滅が始まります。しばらくすると補聴器を認識して「ポピポ」のピープ音が聞こえて補聴器とのペアリングが完了します。完了時、5秒間緑色の点灯後、再度ペアリングモードになることがありますが、リモコンのどれかボタンを押してモードを終了させます。

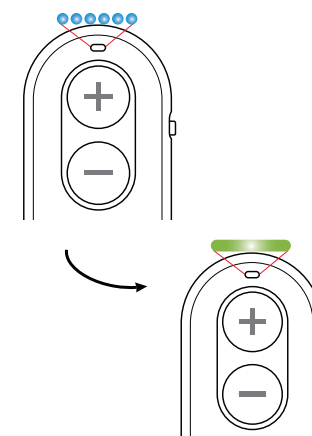

※ これでペアリングが完了しました。