



# Imagine / Amaze / Rely / Trust のフライトモード切替

SolusMaxにて接続する補聴器については、初期の状態では「フライトモード」が「OFF」になっています。使用する場合フィッティングソフトに接続し「フィッティング」→「補聴器の各種コントロール」→「手動コントロール」と開き、一番上にある「機内モードコントロール」にチェックを入れてください。これでフライトモードが使用可能になります。

1. 補聴器の電源を入れます。
2. 10秒以内に電源を2回 OFF - ON します。
3. 起動音が「ポポーン ポポーン」と10回聞こえたら完了です。

**補聴器の操作 ~ <電池式>**

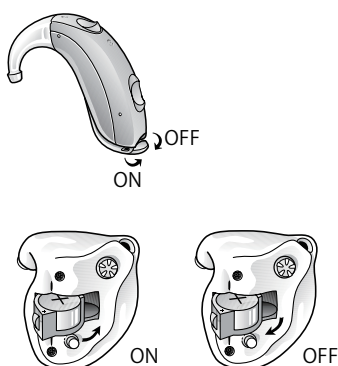

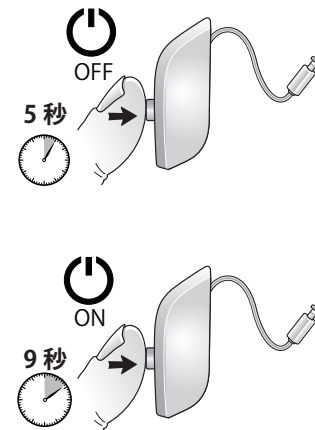1. プッシュボタンを5秒長押しして補聴器の電源を切ります。
2. 再度プッシュボタンを9秒長押しします。
3. 背中の確認ランプが2度点滅が4回繰り返されるか起動音が「ポポーン ポポーン」と10回聞こえたら完了です。

**補聴器の操作 ~ <充電式>**

※ どちらもフライトモードになってから15秒以上経過後、再度電源のOFF - ONを行うことでフライトモードの解除が可能です。