

unitron

## 充電式補聴器が反応しなくなった時の対処方法

### 手順 1

補聴器を充電器から外し、多機能ボタンの下部分を15秒以上押してください。

※ 補聴器のLEDグリーンランプは点灯しません



### 手順 2

補聴器を充電器に入れて、30秒間LEDランプが点滅することを確認してください。

※ 原因が電池容量不足であった場合、そのまま満充電になるまで充電器に差し込んだままにします



どうして電源が入らなくなったか？

リチウムバッテリーが損傷しないように保護回路が働くためです。充電電池の容量が10%未満になったり、充電器への差込が不十分だった場合に、補聴器の機能・電源が自動でオフになります。

※多機能ボタン（ボリューム）の下部分を15秒以上押し続けた場合もこの機能が働きます。